

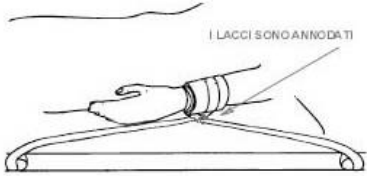


Albo Land srl

Via Mastroianni,9  
40013 Castel Maggiore BO (Italy)  
Tel:+39 051/373838 Fax: +39 051/371877  
P.IVA: 01778301208  
Capitale Sociale €12000 I.V.  
[www.alboland.com](http://www.alboland.com) [info@alboland.com](mailto:info@alboland.com)  
R.E.A. 387661 Iscr.Reg.Imp.BO 163652

**ALBO** *Land* <sup>TM</sup>  
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

REF 200	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 10/05/2018
<b>FERMA POLSO in vello di lana merinos</b>			
			
<b>MISURE:</b> UNICA		<b>COLORE:</b> ECRU'	
<b>INDICAZIONI:</b> IMMOBILIZZANDO IL POLSO DEL PAZIENTE EVITA CHE SI SFILI L'AGO DELLA FLEBO.		<b>LAVAGGIO:</b> LAVABILE A MANO O IN LAVATRICE COME UN NORMALE CAPO DI LANA, ACQUA A 30° PROGRAMMA LANA. ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE A TAPPETO BEN DISTESO PER EVITARE IL FORMARSI DI PIEGHE. RIPASSARE CON SPAZZOLA DURA. POSSIBILI NUMEROSI LAVAGGI.	
<b>COMPOSIZIONE:</b> VELLO DI LANA 100%. GALLONE IN COTONE 100%		<b>CONTROINDICAZIONI:</b> SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	
<b>ISTRUZIONI:</b> INDOSSARE IL POLSINO, FISSARLO FACENDO PASSARE IL GALLONE INFERIORE INTORNO AL POLSO, QUINDI DENTRO ALL'ANELLA METALLICA, TORNARE INDIETRO E ANNODARE I DUE GALLONI ATTORNO AL POLSO. ASSICURARE I LACCI ALLA STRUTTURA DEL LETTO. PER UN MAGGIORE "CONTROLLO" E' POSSIBILE ASSICURARE I LACCI A DUE PUNTI DIVERSI DELLA STRUTTURA. (VEDI FIGURA)		<b>CONFEZIONE:</b> IN SACCHETTO DI PLASTICA.	
<b>AVVERTENZE:</b> DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO		<b>GARANZIA:</b> IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO	
200 N° progressivo: 148757 GMDM: 35304 CND: V0804		