

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	SCHEDA TECNICA CINTURA ERGONOMICA "BELT"	Rev. 0 GEN /2014
	DEMARTA VIRGINIO SAS Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	

DESTINAZIONE D'USO

La cintura ergonomica "BELT" viene utilizzata per aiutare il paziente ad alzarsi o sedersi, sollevarsi da terra, trasferirlo da un letto ad una sedia a rotelle e o servizi igienici o auto od ancora, aiutarlo mentre cammina, offrendogli un supporto e proteggendolo da eventuale cadute. Questa cintura può essere utilizzata sia dal paziente che dall'operatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cintura di Trasferimento imbottita e rivestita da poliestere esternamente e da tessuto antiscivolo internamente.
- Dotato di maniglie, chiusura rapida a clips e cinghie di stringimento.
- Portata Trasferimento: 160 Kg.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Indossare la cintura al paziente e stringere le cinghie fino a fermarla saldamente al corpo. Posizionarsi davanti al paziente e appoggiare le ginocchia a quelle del paziente. Tramite le maniglie, tirare verso di sé fino a che il paziente non sia in posizione eretta. Per farlo sedere, procedere al rovescio.

DIMENSIONI

03.04.6023 - 60/90 cm - Piccola.

03.04.6024 - 80/120 cm - Media.

03.04.6025 - 100/150 cm - Grande

MANUTENZIONE

La cintura è lavabile in lavatrice a 40° C.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il prodotto deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

CODICE ARTICOLO

03.04.6023

03.04.6024

03.04.6025

CODICE ISO: "Inesistente"

RDM: 99504/R

CND: Y0899

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE) - Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

