

**CINTO "ATLAS" FRANGIATO CON PELOTTE**  
**- DESTRO / SINISTRO / DOPPIO -**  
**(cod. 420 / 421 / 422)****Nome Prodotto**

CINTO ATLAS FRANGIATO CON PELOTTE  
DESTRO / SINISTRO / DOPPIO  
(cod. 420 / 421 / 422)

REF	Misure Fianchi (cm)
420	da 80 a 120 (scatto ogni 5)
421	
422	



Colore disponibile: Ecrù.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivo indicato per pazienti con ernia inguinale semplice riducibile. la contenzione dell'ernia è data dalla pelotta inguinale.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Cinto: 76% Cotone, 14% Gomma e 10% Viscosa. Contiene lattice.

Pelotte (Codice Catalogo 083):

100% Gomma Naturale con presenza di Lattice rivestite da 86% Poliestere e 14% Elastan, con piastra in velcro in Polipropilene.

**Istruzioni per l'Uso**

Prima di indossare si consiglia una accurata pulizia della cute nella zona di applicazione. Indossare sopra a biancheria intima.

1. Regolare la circonferenza della cintura e del sotto coscia tramite la fibbia ed i ganci metallici.
2. Posizionare la pelotta nella parte interessata riducendo l'ernia nella propria sede restando in posizione distesa.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Se segnalate dal medico curante ernie non riducibili, affezioni cutanee.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**CINTO "ATLAS" FRANGIATO CON PELOTTE  
- DESTRO / SINISTRO / DOPPIO -  
(cod. 420 / 421 / 422)****Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Per le Pelotte:

Lavare a mano in acqua fredda con detersivo neutro, sciacquare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Non mettere in lavatrice.

Per il Cinto:

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica e scatola di cartone.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Cinto & Pelotte → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: Y060406

Codice EMDN: Y060406

Codice BD/RDM (420): 2528947

Codice BD/RDM (421): 2528948

Codice BD/RDM (422): 2528949



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902