

## **AVVERTENZE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

## **DESCRIZIONE**

Sedile per vasca con profilo ribassato a sei differenti livelli di regolazione in larghezza. Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua. Appoggi per vasca in gomma antiscivolo.

## **MATERIALI COMPONENTI**

Struttura: alluminio anodizzato

Seduta: polietilene

Appoggi per vasca: gomma antiscivolo

## **DATI TECNICI**

Dimensioni della seduta: **37 x 23 cm**

Larghezza: **77-85 cm**

Peso: **1,3 kg**

Portata massima: **120 kg**

## **PRECAUZIONI**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo ed il corretto posizionamento degli appoggi in gomma sul bordo vasca.

Controllare, inoltre, all'atto della regolazione in larghezza, l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri.

Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.

Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio degli appoggi per vasca in gomma.

## **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**



- Collocare la seduta capovolta su una superficie piana.
- Disporre nell'apposita scanalatura ad incastro la parte della struttura indicata con 1.
- Inserire il tubo di estensione indicato con 3 nella parte della struttura sistemata in precedenza (1) e fissare con la spina di bloccaggio.
- Disporre nell'apposita scanalatura ad incastro la parte della struttura indicata con 2.
- Inserire la parte della struttura sistemata in precedenza (2) nel tubo di estensione (3) e fissare con la spina di bloccaggio.
- Ripetere le medesime operazioni con le parti indicate con 4, 5 e 6.
- Assicurarsi dell'avvenuto fissaggio controllando che le spine di bloccaggio siano centrate correttamente nei fori della misura desiderata.

## **CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## **GARANZIA**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## SEDILE REGOLABILE PER VASCA

**AB-41**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
[www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it) • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)