



to your health
Clearview
Clearview Healthcare Products, Inc.

Manuale d'uso

Cuscino a bolle d'aria in PVC

Distribuito da:

 **INTERMED**

Via della Pace, 21

20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. +39-02-98248016

Fax +39-02-98247361

info@intermeditalia.it www.intermeditalia.it

Indicazioni

Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio indicato per la prevenzione dell'insorgenza del decubito in pazienti costretti in carrozzina.

Avvertenze

Sebbene il cuscino sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne provocano l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di fare riferimento ai protocolli locali per la prevenzione del decubito.

Preparazione del cuscino

- 1) Posizionare il cuscino sulla seduta
- 2) Connettere il tubo della monopalla alla valvola ricoprendo interamente la parte metallica zigrinata (fig. 1)
- 3) Afferrare con una mano la parte metallica liscia della valvola. (fig. 2)
- 4) Con l'altra mano afferrare la parte di connessione tra valvola e tubo e ruotare in senso antiorario per aprire la valvola (fig. 3)
- 5) Gonfiare la sezione del cuscino fino alla pressione desiderata o consigliata.
- 6) Chiudere la valvola ruotando in senso orario la parte zigrinata (fig. 2) mantenendo ferma la parte liscia (fig. 3)
- 7) Scollegare la monopalla.

Nota: Per il modello a due valvole, ripetere la procedura sopra descritta anche con l'altra valvola.

In questo modo è possibile regolare le due sezioni in modo indipendente e migliorare il posizionamento e la stabilità del paziente.

Posizionamento del paziente

Fare sedere il paziente sul cuscino e regolare la pressione aprendo lentamente la valvola. Controllare la corretta postura del paziente. Verificare con regolare frequenza la giusta pressione di esercizio.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Pulizia e manutenzione

Cuscino

Pulire il cuscino con acqua e sapone neutro utilizzando un panno umido. Risciacquare sotto acqua corrente. **NON IMMERGERE IL CUSCINO.** Asciugare all'aria aperta. Non lavare in lavatrice. Non asciugare nell'asciugabiancheria. Non autoclavare.

Fodera

Lavare a max. 30°. Non stirare.

Per motivi di igiene, si raccomanda di utilizzare il cuscino con un solo paziente.

Riparazione

Qualora il cuscino venisse accidentalmente perforato può essere riparato con il kit fornito nella confezione.

1. Pulire e asciugare accuratamente la zona
2. Applicare uno strato di collante
3. Coprire con il materiale di riparazione. Lasciare il cuscino sotto un peso fino a completa asciugatura.

Conservazione

Riporre in un luogo asciutto in posizione piana.

Smaltimento

Smaltire il prodotto rispettando le normative ambientali vigenti.

Garanzia

Il prodotto è garantito per 24 mesi per difetti di fabbricazione.