

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	<b>SCHEDA TECNICA</b> <b>SCALETTA A 8 MANIGLIE "PULL UP"</b>	<b>Rev. 0</b> <b>GEN /2014</b>
	<b>DEMARTA VIRGINIO SAS</b> Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	

### DESTINAZIONE D'USO

La scaletta "PULL UP" permette ai pazienti collaboranti o semi collaboranti di alzarsi o fare ginnastica di recupero dell'attività motoria.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scaletta composta da una striscia di nylon resistente e 8 maniglie imbottite.
- Portata Trasferimento: 160 Kg.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Fissare la scaletta alla pediera del letto. Impugnare le maniglie una alla volta, fino ad arrivare alla posizione desiderata.

### DIMENSIONI

7,5 x 175 cm.

### MANUTENZIONE

La scaletta è lavabile in lavatrice a 40° C,

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il prodotto deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

### SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

### CODICE ARTICOLO

03.04.6090

**CODICE ISO:** "Inesistente"

**RDM:** 99504/R

**CND:** Y0899

### NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE)  
- Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

