

Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361



## TRIPODE AD-10

Lotto di produzione **0901**

Codice nomenclatore: **12.03.15.003**



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE

Revisione 00



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
[www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it) • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)



## TRIPODE AD-10

Lotto di produzione **0901**

Codice nomenclatore: **12.03.15.003**



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE

### **Avvertenze**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

### **Descrizione ed indicazioni**

Tripode con base di appoggio regolabile in altezza ad 11 differenti livelli ed impugnatura ergonomica.  
Ausilio per la deambulazione.

### **Materiali componenti**

Impugnatura: polipropilene  
Parte superiore della struttura: alluminio anodizzato  
Parte inferiore e base d'appoggio: acciaio cromato  
Puntali: gomma antiscivolo

### **Dati tecnici**

Regolazione in altezza: **73,5-99 cm**  
Dimensioni della base: **38 x 31 x 31 cm**  
Portata: **114 kg**

### **Pulizia e manutenzione**

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.  
Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma antiscivolo.

### **Regolazione dell'altezza**



Allungare o accorciare il dispositivo fino all'altezza desiderata.

Assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio controllando che la spina sia centrata nel foro della misura desiderata.

### **Precauzioni**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata. Controllare, inoltre, la stabilità del dispositivo.  
Usare particolare cautela nell'eventuale impiego su superfici bagnate o scivolose.

### **Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **Garanzia**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non si applica a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

### **Avvertenze**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

### **Descrizione ed indicazioni**

Tripode con base di appoggio regolabile in altezza ad 11 differenti livelli ed impugnatura ergonomica.  
Ausilio per la deambulazione.

### **Materiali componenti**

Impugnatura: polipropilene  
Parte superiore della struttura: alluminio anodizzato  
Parte inferiore e base d'appoggio: acciaio cromato  
Puntali: gomma antiscivolo

### **Dati tecnici**

Regolazione in altezza: **73,5-99 cm**  
Dimensioni della base: **38 x 31 x 31 cm**  
Portata: **114 kg**

### **Pulizia e manutenzione**

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.  
Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma antiscivolo.

### **Regolazione dell'altezza**



Allungare o accorciare il dispositivo fino all'altezza desiderata.

Assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio controllando che la spina sia centrata nel foro della misura desiderata.

### **Precauzioni**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata. Controllare, inoltre, la stabilità del dispositivo.  
Usare particolare cautela nell'eventuale impiego su superfici bagnate o scivolose.

### **Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **Garanzia**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di