

REF 688EXTRA	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
CINGHIA FERMABRACCIA/CAVIGLIE CON OCCHIELLI.			
MISURA: UNICA.		COLORE: ECRU'	
COMPOSIZIONE: GALLONE 100% COTONE - OCCHIELLI OTT/NK- NASTRO UNCINO 100% PA.		INDICAZIONI: INDICATO PER LIMITARE IL MOVIMENTO DELLA MANO/CAVIGLIA IN PAZIENTI AGITATI, IN MODO DA EVITARE DANNI ALLA PERSONA O AD ALTRI. SOLO L'OPERATORE PROVVISIO DI CHIAVE PUÒ LIBERARE IL PAZIENTE UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE SANITARIO SPECIALIZZATO. SE USATO PER LECAVIGLIE è CONSIGLIABILE L'UTILIZZO DEL NOSTRO COD. 689C.	
LAVAGGIO: LAVARE A MANO IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.		ISTRUZIONI: FISSARE CON GLI APPOSITI BOTTONI L'ESTREMITA' AL MONTANTE DEL LETTO. 2 AVVOLGERE LA FASCIA MORBIDA ATTORNO AL POLSO/CAVIGLIA FISSANDOLA CON IL VELCRO 3 FAR PASSARE IL TIRANTE CON OCCHIELLI NELLA FIBBIA E ASSICURARE CON UN BOTTONE (PRECEDENTEMENTE POSIZIONATO).	
CONFEZIONE: SACCHETTO DI PLASTICA		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE DIETRO PRESCRIZIONE MEDICA DA PERSONALE SANITARIO SPECIALIZZATO. IN CASO DI URGENZE AVERE SEMPRE A PORTATA DI MANO UNA FORBICE O COLTELLO PER TAGLIARE LA CINTURA:		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO.	
NECESSARIE:  4 bottoni 690M + chiave 691M	688ESTRA Progressivo GMDN CND	141738 35304 V0804	