

REF 701	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
IMBRAGATURA CON MUTANDA.			
MISURE: UNICA.		COLORE: ECRU*/BLU	
COMPOSIZIONE: GALLONE:COTONE 100% MUTANDONE: COTONE 90% VISCOSA 10% FIBBIA TRIDENTE DI mm40 PLASTICA ACETILICA RESISTENZA 100kg CERTIFICATI ISO9001		CONFEZIONE: IN SACCHETTO DI PLASTICA	
LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE	
ISTRUZIONI: <ol style="list-style-type: none"> 1. POSIZIONARE L'IMBRAGATURA SULLA SEDUTA DELLA CARROZZELLA CON LA PATTA CON I TIRANTI APPOGGIATA ALLO SCHIENALE DELLA STESSA. (Fig. 1) 2. FAR SEDERE IL PAZIENTE SULLA CARROZZELLA E PORTARE LA PATTA CON LE ANELLE DI ACCIAIO SULLO STOMACO. 3. FARE PASSARE I GALLONI CON LE FIBBIE IN PLASTICA ALL'INTERNO DELLE ANELLE METALLICHE, QUINDI AGGANCIARLI DIETRO ALLO SCHIENALE. 		INDICAZIONI: INDICATO PER I PAZIENTI COSTRETTI SU CARROZZELLA O POLTRONA PER MANTENERE UNA POSTURA DEL TRONCO ERETTA EVITANDO LO SCIVOLAMENTO IN AVANTI.	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO.		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO.	
701 N° progressivo: 149060 GMDN: 13356 CND Y122406			