

REF 701E	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
<p>IMBRAGATURA CON MUTANDA ECONOMICA.</p>			
<p>COMPOSIZIONE: MTP: VELLUTINO POLLIAMIDE 100%, INTERNO POLIURETANO BASE ETERE 100%. GALLONE: 100% COTONE. FIBBIA TRIDENTE DI PLASTICA ACETILICA RESISTENZA 100kg CERTIFICATI ISO9001</p>		<p>MISURE: UNICA.</p>	
<p>COLORE: BLU.</p>		<p>LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE NON CENTRIFUGARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.</p>	
<p>INDICAZIONI: INDICATO PER I PAZIENTI COSTRETTI SU CARROZZELLA O POLTRONA PER MANTENERE UNA POSTURA DEL TRONCO ERETTA EVITANDO LO SCIVOLAMENTO IN AVANTI.</p>		<p>ISTRUZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POSIZIONARE L'IMBRAGATURA SULLA SEDUTA DELLA CARROZZELLA CON LA PATTA CON I TIRANTI APPOGGIATA ALLO SCHIENALE DELLA STESSA. 2. FAR SEDERE IL PAZIENTE SULLA CARROZZELLA E PORTARE LA PATTA CON LE ANELLE DI PLASTICA SULLO STOMACO. 3. FARE PASSARE I GALLONI ALL'INTERNO DELLE ANELLE, QUINDI CHIUDERE LA FIBBIA. 	
<p>CONFEZIONE: SACCHETTO DI PLASTICA</p>		<p>CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.</p>	
<p>AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO.</p>		<p>GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO. <u>Per il modello ritardante di fiamma</u> Rapporto di prova alla ignifugabilità n°. 1266.0UN0180/07 Metodo prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNI 8457-UNI 8457/A1 • UNI 9174-UNI 9174/A1 	
<p>701E N° progressivo: 1416751 GMDN: 13356 CND: Y122406</p>			