

REF 703E	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
<b>DIVARICATORE PER CARROZZELLA ECONOMICO.</b>			
<b>COMPOSIZIONE:</b> MTP: VELLUTINO POLLIAMIDE 100%, INTERNO POLIURETANO BASE ETERE 100%. GALLONE: 100% COTONE. FIBBIA TRIDENTE DI PLASTICA ACETILICA RESISTENZA 65kg CERTIFICATI ISO9001		<b>MISURE:</b> UNICA.	
<b>COLORE:</b> BLU		<b>CONFEZIONE:</b> SACCHETTO DI PLASTICA.	
<b>INDICAZIONI:</b> IL PRESIDIO è INDICATO PER PAZIENTI COSTRETTI SU CARROZZELLA, PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO IN AVANTI MANTENENDO LE GAMBE IN POSIZIONE DIVARICATA		<b>LAVAGGIO:</b> LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE NON CENTRIFUGARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.	
<b>ISTRUZIONI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APPOGIARE IL DIVARICATORE ALLA SEDUTA CON IL LATO LUNGO RIVOLTO DALLA PARTE DELLO SCHIENALE, ALLACIARE LA FIBBIA A TRIDENTE DIETRO LO SCHINALE</li> <li>2. FARE SEDERE IL PAZIENTE</li> <li>3. ALLACIARE LE 2 FIBBIE INTORNO ALLE COSCE CON LE FIBBIE APPOGGIATE AL VELLUTINO BLU COME DA FIGURA.</li> </ol>		<b>AVVERTENZE:</b> DISPOSITIVO NON STERILE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO	
<b>CONTROINDICAZIONI:</b> SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.		<b>GARANZIA:</b> IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO.	
<b>703E</b> N° progressivo: 1416765 GMDM: CND: Y121821			