

REF 704	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi lotto in Etichetta.	Ultima modifica. 05/06/2018
<p align="center">IMBRAGATURA 6 TIRANTI MOD.RAGNO</p>			
MISURE: UNICA.		COMPOSIZIONE: IMBOTTITURA:POLIAMMIDE 66% POLIURETANO 34% GALLONE: COTONE 100% FIBBIA IN PLASTICA CERTIFICATA ISO9001 TEST TRAZIONE 100kg	
COLORE: BLU.		CONFEZIONE: SACCHETTO DI PLASTICA.	
INDICAZIONI: INDICATO PER I PAZIENTI COSTRETTI SU CARROZZELLA O POLTRONA PER MANTENERE UNA POSTURA DEL TRONCO ERETTA EVITANDO CHE SCIVOLINO IN AVANTI.		ISTRUZIONI D'USO: <ol style="list-style-type: none"> 1. POSIZIONARE IL SUPPORTO SULLA SEDUTA FACENDO PASSARE I 2 TIRANTI TRA LO SCHIENALE E LA SEDUTA 2. FARE SEDERE IL PAZIENTE 3. APPOGGIARE IL GALLONE (CON L'ETICHETTA) SUL VENTRE DEL PAZIENTE E REGOLARE LA TENSIONE SUL RETRO DELLA CARROZZELLA CON LA FIBBIA DI PLASTICA A SCATTO. 4. PORTARE I RIMANENTI 2 GALLONI SUL RETRO FACENDOLI PASSARE SULLE SPALLE DEL PAZIENTE. 5. FISSARE E REGOLARE LA TENSIONE CON LE FIBBIE A SCATTO DEI 6 GALLONI. 	
CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.		LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE NON CENTRIFUGARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE.SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO.		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO.	
704 Progressivo 149102 GMDN 13356 CND Y122406			