

SEDIA ELEVATA PRO CLASSICA – 821061

MANUALE DI ISTRUZIONI



INTRODUZIONE

La poltrona elevabile Pro Classic è progettata per aiutare le persone ad alzarsi facilmente dalla sedia utilizzando motori controllati elettronicamente.

Si prega di leggere attentamente il manuale per garantire un uso corretto della sedia, in particolare le note di sicurezza.

SPECIFICHE

Larghezza sedile: 55 cm

Profondità sedile: 54 cm

Altezza seduta: 51 cm

Altezza schienale: 70 cm

Peso della sedia: 60 kg

Carica massima: 160 kg

Alimentazione : 100-240 V // 50 Hz 70 W

Materiali: rivestimento in PU,
Imbottitura in schiuma PU e fibre di poliestere,
Struttura in legno e acciaio

IDENTITA'

SICUREZZA

1. Montare la sedia correttamente secondo le istruzioni di montaggio allegate. I produttori di sedie a rotelle, i loro agenti e distributori non sono responsabili per danni causati da un montaggio improprio.
2. Posizionare la sedia su un pavimento piano e piano.
3. Non utilizzare la sedia in un ambiente eccessivamente umido o polveroso per evitare il rischio di scosse elettriche e problemi meccanici. La sedia deve essere collocata in una stanza asciutta. Non utilizzare la sedia quando la temperatura ambiente supera i 40 gradi.
4. Non utilizzare la sedia a rotelle all'aperto.
5. Quando la sedia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro per evitare il surriscaldamento.
6. Non appoggiare o appoggiare oggetti pesanti sui braccioli, sul poggiatesta o sullo schienale della sedia.
7. Non saltare o giocare sulla sedia. I bambini che usano la sedia devono essere sorvegliati da un adulto. La sedia non è progettata per i bambini.
8. Assicurarsi che la tensione corrisponda alle specifiche elencate per la sedia.
Il collegamento elettrico deve essere eseguito secondo le normative locali.
Non estrarre bruscamente la spina dalla presa a muro e non staccare la spina tirando il cavo.
9. Non collegare o scollegare la spina dalla presa a muro con le mani bagnate. Potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o guasti meccanici.
10. Non utilizzare la sedia se il cavo dell'adattatore o la spina sono danneggiati o se la presa elettrica è eccessivamente allentata.
11. Prestare attenzione quando si aziona la funzione di sollevamento quando lo schienale della sedia è reclinato. Lo schienale deve essere in posizione eretta quando si entra o si esce dalla sedia, salvo il caso di trasferimento laterale con elevazione verticale.
12. Azionare il freno delle ruote e assicurarsi che la sedia sia stabile prima di rotolare.
trasferimento.

In caso di malfunzionamento, contattare il proprio rivenditore.

IDENTITA'

Nota : tutte le riparazioni devono essere eseguite da tecnici qualificati.

Attenzione : si può creare un improvviso aumento della temperatura condensa su parti elettriche o meccaniche. Si consiglia di lasciare la sedia a temperatura ambiente per almeno un'ora prima di utilizzarla garantire il corretto funzionamento e ridurre il rischio di guasti meccanici.

Non utilizzare la poltrona elevabile nelle seguenti situazioni:


- a) Versamento accidentale di acqua sul dispositivo. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
- b) Strappo del rivestimento, esponendo la meccanica interna.
- c) Guasto o qualsiasi altra condizione anomala durante il funzionamento.

Prestare attenzione in caso di interruzione di corrente. Esiste il rischio di lesioni se l'alimentazione viene ripristinata inaspettatamente e vengono premuti i tasti operativi.

Evitare di utilizzare la sedia durante forti temporali.
Spegnerne immediatamente il controllo dell'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro in caso di danni o malfunzionamenti evidenti.

ISTRUZIONI D'ASSEMBLAGGIO


- 1) Estrarre il sedile e lo schienale dalla loro confezione.
- 2) Tenere il sedile e l'aletta del rivestimento con entrambe le mani e allineare le staffe.
- 3) Applicare una pressione verso il basso e assicurarsi che entrambi i lati scattino in posizione di blocco.

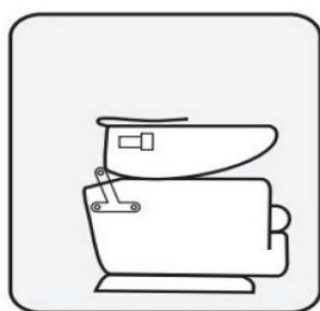

Étape 1



Étape 2

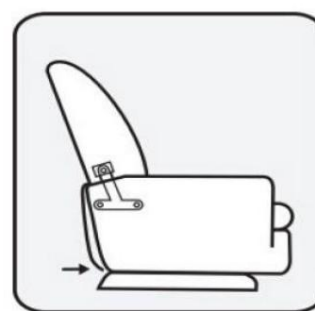

Étape 3

Nota : entrambi i supporti posteriori devono essere fatti scorrere simultaneamente sulle barre verticali per evitare inceppamenti.


Nota : non montare la sedia se il rivestimento o qualsiasi parte della sedia è danneggiata.

IDENTITA'

CONNESSIONE ELETTRICA

Nota : i cavi devono essere collegati correttamente per un corretto funzionamento.


- 1) Connettore motore da cablare
- 2) Collegare il connettore all'adattatore
- 3) Connettore adattatore da inserire
- 4) Collegamento telecomando

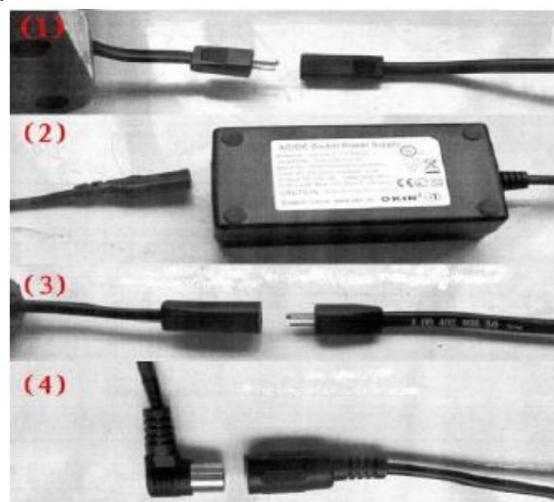

INSTALLAZIONE MANIGLIA

La maniglia posteriore delle sedie deve essere installata alla consegna.

Allineare i fori della maniglia di spinta con quelli dello schienale e fissarli con le viti in dotazione.

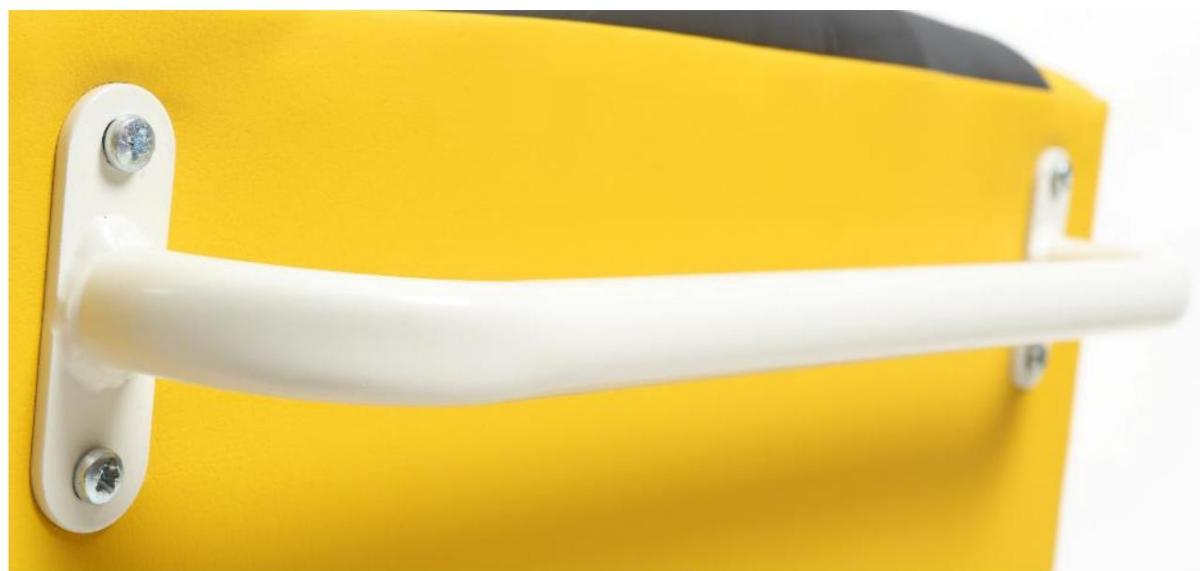

POSIZIONAMENTO DELLA SEDIA

Lascia abbastanza spazio davanti e dietro la sedia per consentirne l'inclinazione.

Per consentire una reclinazione libera, mantenere uno spazio minimo di 65 cm dietro la poltrona.

Lasciare almeno 40 cm davanti alla sedia.

Posizionare la sedia a rotelle su una superficie piana o su un pavimento in una stanza asciutta.

IDENTITA'

Attenzione

Rimuovere eventuali ostruzioni dietro o davanti alla sedia per consentirne l'inclinazione e il sollevamento in sicurezza durante il funzionamento.

La sezione tra sedile e poggiatesta deve essere libera da qualsiasi ingombro per evitare il rischio di pizzicamento quando la sedia è in uso.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

1. Conservazione

Rimuovere polvere e sporco. Tenere la sedia pulita e lontana da aree ad alta umidità.

Se la sedia non viene utilizzata per molto tempo, coprirla con un panno per proteggerla dalla polvere. Conservare in un luogo asciutto.

Non riporre la sedia alla luce diretta del sole o in luoghi con temperature elevate. L'esposizione potrebbe causare lo scolorimento del tessuto.

2. Manutenzione

Prima della pulizia, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che la spina di alimentazione sia scollegata dalla presa.

Non utilizzare salviette umidificate per pulire le sedie con rivestimento in similpelle (poliuretano) a meno che non sia la nostra similpelle resistente all'incontinenza. È possibile utilizzare detergenti per la pelle.

3. Corpo della sedia

Usa un sapone molto delicato per pulire la plastica, il telaio e il rivestimento della sedia. Pulisci delicatamente tutte le tracce di sapone con un panno asciutto.

Per pulire una macchia asciutta, immergi un panno morbido in acqua tiepida e sapone, strizzalo bene e pulisci la macchia.

Non utilizzare detergenti come benzene o diluenti o altri detergenti che potrebbero scolorire il tessuto o graffiare il rivestimento.

Non rimuovere il rivestimento per pulirlo. È severamente vietato stirare il rivestimento.

SISTEMA DI BATTERIA DI BACKUP

Le sedie sono dotate di un sistema di batteria di riserva per consentire all'utente di alzarsi dalla sedia durante un'interruzione di corrente.

Sono necessarie due batterie da 9 volt e non incluse con la sedia.

In caso di interruzione di corrente, la sedia passerà automaticamente alla batteria di riserva, ma solo per un ciclo prima che le batterie si scarichino. Si consiglia di sostituire le batterie dopo ogni utilizzo di emergenza.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO



La poltrona elevabile Pro Classic ha una funzione di sollevamento e abbassamento verticale. Questa caratteristica consente di alzare o abbassare la sedia secondo necessità per consentire all'utente di trasferirsi in sicurezza dalla sedia al letto o ad un'altra superficie.

Quando la sedia viene sollevata all'altezza appropriata, il bracciolo della sedia sul lato di trasferimento può essere rimosso e l'utente può quindi scivolare sul letto. I due braccioli possono essere rimossi per scegliere il lato del trasferimento.

Attenzione: assicurarsi che i blocchi delle ruote posteriori della sedia a rotelle siano attivati durante i trasferimenti per evitare incidenti o lesioni.

Utilizzare solo un panno asciutto per pulire il telecomando. Un'umidità eccessiva può danneggiare il telecomando.