

**WALKER TUTORE
TIBIO TARSICO FISSO**

Misura	Codice	Descrizione
S (36-39)	WKF-S	Walker tutore tibio tarsico fisso misura small
M (40-43)	WKF-M	Walker tutore tibio tarsico fisso misura medium
L (44-46)	WKF-L	Walker tutore tibio tarsico fisso misura large
XL (>46)	WKF-XL	Walker tutore tibio tarsico fisso misura extra-large
S (36-39)	WKF-CS	Walker tutore tibio tarsico fisso corto misura small
M (40-43)	WKF-CM	Walker tutore tibio tarsico fisso corto misura medium
L (44-46)	WKF-CL	Walker tutore tibio tarsico fisso corto misura large
XL (>46)	WKF-CXL	Walker tutore tibio tarsico fisso corto misura extra-large

Indicazioni

- Distorsioni gravi.
- Fratture stabili del piede e della caviglia.
- Stabilizzazione della caviglia in fase pre o post-operatoria.
- Per il solo modello alto, fratture stabili di tibia e perone.

Descrizione

- Struttura in nylon a tallone aperto con suola antiscivolo.
- Rivestimento plantare in materiale plastico morbido.
- Tubolare imbottito completamente asportabile con chiusure a velcro.
- Per il modello alto: cinque cinghie di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro che consentono il corretto posizionamento ed il fissaggio del tubolare.
- Per il modello basso: tre cinghie di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro che consentono il corretto posizionamento ed il fissaggio del tubolare e doppia imbottitura laterale.
- A corredo, tre imbottiture supplementari di protezione.

**WALKER TUTORE
TIBIO TARSICO FISSO****Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà gli adattamenti necessari nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della tutore devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della struttura del tutore e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della tutore.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.

Dati tecnici

Modello	Dimensioni struttura			Dimensioni tubolare	
	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Altezza
WKF-S	265 mm	365 mm	138 mm	381 mm	408 mm
WKF-M	295 mm	410 mm	141 mm	393 mm	420 mm
WKF-L	313 mm	421 mm	149 mm	405 mm	432 mm
WKF-XL	331 mm	434 mm	154 mm	417 mm	444 mm
WKF-CS	265 mm	220 mm	138 mm	338 mm	242 mm
WKF-CM	295 mm	222 mm	141 mm	350 mm	254 mm
WKF-CL	313 mm	224 mm	149 mm	362 mm	266 mm
WKF-CXL	331 mm	246 mm	154 mm	374 mm	278 mm

Materiali componenti

Struttura	Nylon
Suola	TPR
Rivestimento plantare	Polipropilene
Tubolare	Poliestere
Imbottitura tubolare	Poliuretano
Cinghie e chiusure	Nylon
Fibbie	Poliossimetilene
Imbottiture supplementari	Esterno poliestere ed interno poliuretano

Modalità di lavaggio**Lavaggio parti in tessuto**

Rimuovere il tubolare e le cinghie di stabilizzazione e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

**Lavaggio parti rigide**

Pulire con spugna morbida e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016
Fax. +39-02-98247361

SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2013

WALKER TUTORE TIBIO TARSICO FISSO

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y061206

N. Repertorio

WKF-S	987567/R
WKF-M	987586/R
WKF-L	987587/R
WKF-XL	987588/R
WKF-CS	987589/R
WKF-CM	987590/R
WKF-CL	987591/R
WKF-CXL	987592/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE