

PERACETIC PLUS

DISINFETTANTE STERILIZZANTE A FREDDO

DISPOSITIVO MEDICO CE n° 0546

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Tetracetiletilendiammina.....g.	24,800
Sodio Perborato Monoidrato.....g.	50,094
Acido Citrico (Anidro).....g.	24,800
Sequestrante, antiossidante, coloranti q.b. a.....g.	100,000

ASPETTO:

Polvere fine bianca.

ODORE:

Caratteristico

ATTIVITA':

PERACETIC PLUS è uno sterilizzante a freddo: l'acido peracetico che si forma dalla reazione dell'acqua ossigenata (che si ottiene dopo dissoluzione del prodotto in acqua) e tetracetiletilendiammina esplica una efficace attività biocida nei confronti di spore, virus (HIV,HBV,HCV), batteri, mycobacteri e funghi.

Alle concentrazioni indicate (1,6%) esercita l'azione sterilizzante dopo un tempo di 10 minuti di contatto.

Il prodotto può essere utilizzato come disinfettante anche a concentrazioni dimezzate (0,8%) la sua azione si esplica dopo 10 minuti di contatto.

Il prodotto è attivo dopo 15 minuti dalla dissoluzione, la soluzione così preparata è attiva per un tempo massimo di 24 ore.

Dai tests effettuati si dimostra che il prodotto è efficace anche in presenza di materiale organico, ma è buona norma immergere i dispositivi previamente detersi con apposito detergente, meglio se a base enzimatica.

**INDICAZIONI
D'USO:**

PERACETIC PLUS per le sue caratteristiche è indicato per una sterilizzazione e/o disinfezione rapida a freddo di: endoscopi, fibre ottiche, strumenti chirurgici e odontoiatrici, trasduttori, ect.

Può essere utilizzato anche con lava endoscopi automatici ect.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1) Preparare la quantità d'acqua potabile (di rubinetto) tiepida nella apposita vaschetta, controllare che la temperatura sia intorno a 35 °C.
- 2) Versare (con l'apposito misurino dosatore) circa gr 16 di polvere per litro d'acqua (oppure 1 bustina per litro d'acqua).
- 3) Mescolare la soluzione fino ad ottenere una soluzione limpida di colore blu chiaro.
- 4) Attendere 15 minuti prima di usare la soluzione
- 5) Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando un detergente appropriato.
- 6) Immergere gli strumenti nella soluzione di PERACETIC PLUS per almeno per 10 minuti.
- 7) Rimuovere gli strumenti e risciacquare in acqua sterile.

VALIDITA' E

CONSERVAZIONE:

Il prodotto ha una validità 2 anni dalla data di preparazione se conservato nella confezione integra sigillata.

Il prodotto teme l'umidità.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

TOSSICITA':

PERACETIC PLUS alla concentrazione d'uso non presenta alcuna controindicazione per la persona e l'ambiente.

L'agente attivo "acido peracetico" se ingerito, è solo moderatamente tossico (acido peracetico DL 50 = 1540 mg/kg)

La polvere può essere irritante per gli occhi: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

Alle normali concentrazioni operative non ha effetti corrosivi o irritanti sulla cute.

IMPATTO

AMBIENTALE:

Il residuo a contatto con le acque di scarico, si degrada immediatamente in acido acetico, acqua e ossigeno, agenti non considerati nocivi o inquinanti per l'ambiente. Pertanto le soluzioni d'impiego esauste non necessitano trattamenti particolari per lo smaltimento e possono essere riversate tranquillamente nella rete fognaria.

AVVERTENZE:

La soluzione è attiva dopo 15 minuti dalla completa dissoluzione della polvere, e resta attiva per un massimo di 24 ore dalla preparazione.

Irritante(Xi)

Fraasi R 36/ 38 irritante per gli occhi e per la pelle

<p>GERMO S.p.A. <u>Officina di Cormano MI</u></p>	<p>SCHEDA TECNICA</p>	<p>Doc. FT N° 01 Emissione 11/03/2004 Rev. 01/04 Pagina 3 di 3</p>
--	------------------------------	---

FraSI S 22 non respirare la polvere. S 26 in caso di contatto con gli occhi sciacquare subito ed interpellare immediatamente il medico.

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non usare per strumenti in lega di alluminio e Nichel

AUTORIZZAZIONE:

Dispositivo Medico classe II a CE 0546 secondo direttiva CEE 93/42

CONFEZIONI:

Barattolo da gr 500

Dimensioni esterne cartone: mm238x121x130

Bancale da 160 scatole (5 piani da 32 scatole)

BAR CODE 0800911003004

Bustine da gr 16 in astucci da 24 bustine / 48 bustine

Dimensione esterne cartone: mm181x138x134

BAR CODE 0800911003005

FABBRICANTE:

Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) – tel 02.66301938 – fax 02.66301939

www.germo.it

info@germodis.com