

**Nome Prodotto**

VELLO DI MONTONE NATURALE (cod. F2002)

REF	Misure cm
F2002	60 x 90 circa



Colore: Naturale

**Destinazione d'Uso**

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi post operatori e nelle lunghe degenze.

Possono essere anche utilizzati da persone sofferenti per problemi ossei, artrosi, artriti, per mantenere la parte dolorante a calore costante e alleviare la sintomatologia dolorosa.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

100% Pelle di Montone Naturale



Dispositivo Non Sterile

**Istruzioni per l'Uso**

Stendere il vello sulla carrozzella o sul letto fra il materasso ed il lenzuolo.

Il vello può essere anche posto a diretto contatto con il paziente.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida, a 30°C con detersivo per capi delicati, anche in lavatrice con il programma lana, non strizzare non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Tenere il vello ben disteso per evitare il formarsi di pieghe. Ripassare con spazzola dura. Sono possibili numerosi lavaggi.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non strirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in scatola di cartone.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Maniglia della Scatola → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Vello → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: V080702

Codice EMDN: V080702

Codice BD/RDM: 149433



Dispositivo Medico di Classe I  
*Regolamento (UE) 2017/745*



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902