


MADE IN ITALY

MAGIC CARE®

Il vero benessere
Healthcare at Home

Ghibli

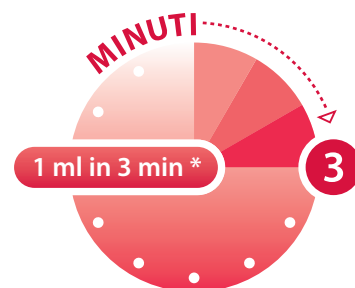

- **Aerosol compatto e silenzioso**
Compact and silent aerosol therapy unit
- **Massima efficacia terapeutica in tutto il tratto respiratorio**
For the best therapeutic efficacy on the entire respiratory tract
- **Ampolla brevettata con antirovesciamento e 2 velocità, micronizzazione testata TÜV (EN 13544-1)**
Patented nebuliser with non-spill system and 2 speeds, particle size tested by TÜV (EN 13544-1)



* Valore approssimativo riscontrato con soluzione fisiologica 0.9%

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione Nebulisation technical features

Ampolla RF6 basic² / RF6 basic² nebuliser

	Con tappo With Cap STANDARD MODE	Senza tappo Without Cap "HIGH SPEED" MODE	
Erogazione Max Max delivery	0,25 ml/min (approx) 0.25 ml/min (approx)	0,32 ml/min (approx) 0.32 ml/min (approx)	
MMAD	3,8 µm 3.8 µm	4 µm	Caratterizzazione in vitro eseguita presso Inamed Research GmbH & Co. KG per conto di TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in conformità al nuovo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia, Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. In vitro testing carried out at the Inamed Research GmbH & Co. KG on behalf of TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in compliance with the new European Standard for aerosol therapy appliance and Standard EN 13544-1. Further details available on request.
Frazione respirabile < 5 µm Breathable fraction < 5 µm (FPF)	62%	63%	
Capacità massima Maximum fill volume	8 ml		

Caratteristiche tecniche Technical features

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)

Alimentazione/Potenza: Power supply/Power:	230 V ~ 50 Hz/130 VA Other voltages available on request
Filtraggio aria: Air filtering:	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)
Portata aria al compressore: Compressor air output:	9 l/min (approx.)
Pressione Max: Max pressure:	1,5 bar (approx.) 1.5 bar (approx.)
Rumorosità (a 1 m): Sound level (at 1 m):	57 dB (A) (approx.)
Dimensioni: Dimensions:	16 (L) x 20 (P) x 12 (H) cm 16 (length) x 20 (width) x 12 (height) cm.
Peso apparecchio: Handset Weight:	1,5 Kg 1.5 Kg
Conforme alla direttiva 93/42 CEE (solo per unità 230 V ~ 50 Hz): In compliance with Dir. 93/42/EEC (for the 230 V ~ 50 Hz unit only):	CE 0051
Omologazioni: Approvals:	KEMA (Type P0504EM F400)
Garanzia: Warranty:	2 ANNI Please refer to your local dealer

GHIBLI	Codice Code	SC11P00	 8 018294 008543
	Imballo Master carton	n° 8 Pz 8 pieces	

Maggiori informazioni sui prodotti Magic Care sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it
For further information on Magic Care products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it

MAGIC CARE

è un marchio registrato di proprietà di

FLAEM NUOVA S.p.A

Via Colli Storic, 221-223-225

25010 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)

Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287

E-mail: info@flaemnuova.it

www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Ampolla a 2 velocità / 2 speeds nebulizer

Modalità Standard
Inspirazione con tappo
per una erogazione
ottimale ed una minima
dispersione di farmaco

Standard mode
Inspiration with cap for
a best delivery and reduced
dispersion of the nebulised
medication

Modalità "High Speed"
Inspirazione senza
tappo per una più
rapida applicazione

"High Speed" mode
Inspiration without cap
for a faster application

Sistema antirovesciamento / Non-spill system



L'ampolla RF6 basic² è indicata anche per l'uso pediatrico, poiché il sistema antirovesciamento di cui è dotata impedisce la fuoriuscita del farmaco anche in caso di totale capovolgimento accidentale dell'ampolla.
The RF6 basic² nebuliser is also suitable for pediatric use, since the non-spill system prevents medication from spilling out even if the nebuliser is accidentally tipped over.

Dotazione accessori / Accessories contents



1. Ampolla RF6 basic²

RF6 basic² nebuliser

2. Bocaglio

Mouthpiece

3. Nasale pediatrico

Child nasal prong

4. Mascherina

Mask

5. Pochette per accessori

Pochette bag for accessories

6. Aria depurata con filtraggio di tipo professionale

Air purified by a professional filter

Export Department of **FLAEM NUOVA**

medexpo
international s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769 - Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com