

Le fodere dei cuscini Preventix sono realizzate con un tessuto rivestito in poliuretano. Il materiale impiegato è impermeabile ai liquidi ma non al vapore. E' resistente ai batteri e alle muffe.

Le fodere sono rimuovibili e le cerniere sono protette dall'infiltrazione di liquidi da una sovracopertura.

Per preservare la qualità del prodotto e allungarne la vita vi suggeriamo di osservare le seguenti istruzioni:

### **ISTRUZIONI GENERALI**

- Verificate regolarmente lo stato generale della fodera (buchi, abrasioni...) e non impiegate il cuscino se c'è un difetto sulla fodera.
- Non utilizzate il cuscino se la fodera è ancora bagnata o non completamente asciutta.
- Per non danneggiare la fodera, è preferibile evitare di impiegare solventi o soluzioni di acido clorico. Se risultasse necessario impiegare questo tipo di prodotti, si suggerisce di diluire la clorina e risciacquare molte volte la fodera con acqua pulita.
- Mentre pulite una fodera, impiegate una di ricambio.
- La sterilizzazione non è consigliata e potrebbe danneggiare il prodotto.

### **MANUTENZIONE GIORNALIERA**

- Se il paziente non è infetto, è sufficiente pulire la superficie della fodera con una soluzione decontaminante non clorica. Impiegate guanti monouso.
- Se il paziente è infetto, si consiglia di lavare in lavatrice.
  - Prima di mettere in lavatrice, o spruzzate la fodera con una lozione decontaminante non clorica e lasciatela agire o immergetela nella lozione.
  - Lavate in lavatrice fino a 90° con detergenti neutri, senza ammorbidenti.
  - Asciugate all'aria o nell'asciugatrice a temperatura moderata.
  - Attenzione, impiegate sempre guanti monouso.

