



MOPEDIA

CE

MA SEDIE COMODE 01-A



MORETTI

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano 52022
Cavigliola (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

SEDIE COMODE

MANUALE DI ISTRUZIONI

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una Sedia Comoda della linea **MOPEDIA by MORETTI**. Il loro design e la loro qualità garantiscono comfort, nella massima sicurezza ed affidabilità. Le Sedie Comode **MOPEDIA by MORETTI** sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un corretto utilizzo in ambienti interni. Il prodotto da voi acquistato è stato interamente studiato e progettato in Italia dall'ufficio Ricerca e Sviluppo della **Moretti S.p.A.** - Italia. I materiali utilizzati, gli accessori ed i test di qualità sono costantemente controllati da personale della **Moretti S.p.A.** La sola produzione è fatta in Cina e risponde ai requisiti dettati dalle vigenti disposizioni europee sui dispositivi medici (**93/42/CEE**).

Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la Sedia Comoda. In caso di dubbi la preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

DESTINAZIONE D'USO

Le Sedie Comode **MOPEDIA** sono destinate al trasporto ed alla mobilità di persone con difficoltà motorie in ambienti interni.

La **MORETTI S.p.A.** declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La **MORETTI S.p.A.** dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa **MORETTI S.p.A.** e facenti parte della famiglia **SEDIE COMODE** sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva **93/42/CEE** sui **DISPOSITIVI MEDICI**.

A tal scopo la **MORETTI S.p.A.** garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue :

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva **93/42/CEE** come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**.
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
6. **NON E' CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla **MORETTI S.p.A.**
7. La **MORETTI S.p.A.** mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla **Direttiva 93/42/CEE**.

MODELLI

La linea di Sedie Comode MOPEDIA è composta da 6 diversi prodotti :

RC100 Seduta L 42x43 P cm
 SEDIA COMODA MOPEDIA FISSA 4 PIEDINI



RC110 Seduta L 42x43 P cm
 SEDIA COMODA MOPEDIA FISSA
 4 RUOTE



RC120 Seduta L 43x42 P cm
 SEDIA COMODA MOPEDIA REGOLABILE
 4 RUOTE BASE



RC125 Seduta L 43x42 P cm
RC127 Seduta L 48x42 P cm
 SEDIA COMODA MOPEDIA
 REGOLABILE 4 RUOTE DELUXE



RC130 Seduta L 43x42 P cm
RC132 Seduta L 48x42 P cm
 SEDIA COMODA MOPEDIA
 REGOLABILE 4 RUOTE DELUXE



RC140 Seduta L 43x42 P cm
RC142 Seduta L 48x42 P cm
 SEDIA COMODA MOPEDIA
 REGOLABILE 2 RUOTE
 GRANDI DELUXE



MONTAGGIO

Tutte le Sedie Comode MOPEDIA vengono fornite con schienale e braccioli smontati, nei modelli regolabili anche le pedane vengono fornite smontate. Per il montaggio dello schienale è sufficiente infilare le due estremità dei tubi nelle apposite aperture previsto nella parte posteriore della sedia (FIG. 1).

A quel punto fissare lo schienale stringendo i due pomelli di colore nero (FIG. 2).



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

I braccioli devono essere inseriti negli alloggiamenti laterali avendo cura di inserire contemporaneamente le due diverse estremità. Assicurarsi che il bracciolo sia fissato correttamente (FIG.3). Le pedane regolabili devono essere inserite all'esterno della sedia comoda inserendo nei due perni la parte superiore della pedana (FIG. 4). Attenzione ad individuare correttamente quale pedana utilizzare. I poggiatesta devono essere sempre all'interno della sedia comoda. Per fissare la pedana assicurarsi che la leva di bloccaggio sia ben fissata all'interno della sedia comoda (FIG. 5). Inserire la tazza WC dalla parte posteriore della Sedia facendo attenzione ad inserirla correttamente nelle guide previste.



FIG. 4



FIG. 5

REGOLAZIONE PEDANE (dove previsto)

Le pedane delle sedie comode possono essere regolate secondo l'altezza che offre il miglior confort allentando la vite (FIG. 6b) o la leva di bloccaggio (FIG. 6a) e comunque ad una altezza dal pavimento non inferiore ai 6,5 cm. Controllare sempre che le due pedane siano alla stessa altezza. Per la regolazione del supporto per la gamba delle pedane elevabili in altezza, ruotare lo stesso verso l'esterno e scegliere una delle tre posizione previste, riportare quindi lo stesso in posizione originaria facendo attenzione al suo corretto bloccaggio (FIG. 7).

Per l'elevazione in altezza alzare la pedana, nel caso in cui si desideri abbassare la pedana premere prima la leva posta sull'esterno della pedana e poi abbassare la stessa (FIG. 8).



FIG. 6a



FIG. 6b



FIG. 7



FIG. 8

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE (dove previsto)

Per la regolazione dello schienale allentare i due morsetti di colore nero posti nelle due parti laterali (FIG. 9), spingere lo schienale fino a raggiungere l'inclinazione desiderata e stringere nuovamente i due pomelli. I modelli **Deluxe** hanno uno schienale regolabile a molla che torna in posizione verticale senza nessun intervento supplementare. Si ricorda comunque di fissare i morsetti di bloccaggio posti sulla parte laterale della sedia comoda (FIG. 10).



FIG. 9

UTILIZZO

Per spingere la Sedia Comoda usare sempre e solo il maniglione posteriore, non spingere mai utilizzando altri appoggi. Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato. E' comunque raccomandata una assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi. Per rallentare in una discesa non usare i freni delle ruote.



FIG. 10

Non cambiare bruscamente la direzione in discesa. Per la discesa e la salita delle scale farsi sempre aiutare da una persona bloccando i freni della Sedia Comoda.

Nel caso in cui due persone sollevino la Sedia Comoda, evitare di impugnarla in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le impugnature posteriori.

Attenzione:

Non fare pressione sui poggiatesta quando si sale o si scende dalla Sedia.

FRENI

Bloccare le ruote della sedia prima di salire, scendere, allungarsi avanti oppure prendere l'ascensore. Sui modelli a ruote piccole i freni vengono azionati premendo la leva posta su tutte le ruote della sedia (FIG. 11). Su gli altri modelli il freno viene attivato tirando completamente verso l'alto la leva (FIG. 12 e 13).



FIG. 11

Se regolata correttamente, la leva del freno deve stringere bene la ruota cioè deve essere 5 o 6 mm dentro la gomma. In caso contrario verificare la pressione dei pneumatici. In caso di necessità regolare i freni allentando il dado di bloccaggio utilizzando la chiave in dotazione e fare scorrere il morsetto in avanti o indietro secondo le necessità.

Fissare bene il dado di bloccaggio.



FIG. 12



FIG. 13

RUOTE

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate se necessario. Rimuovere la forcella svitando il bullone e lubrificare il perno (FIG. 14).

Rimuovere anche la ruota dalla forcella e lubrificare i perni. Assemblare di nuovo la ruota e la forcella stringendo bene le viti finché non rimanga nessun gioco, le ruote devono girare liberamente. Nei modelli **RC140** e **RC142** le ruote grandi posteriori devono essere controllate periodicamente e non devono oscillare in nessun modo.

In caso di oscillazione della ruota, stringere leggermente il dado del perno (FIG. 15). Per testare la ruota inclinare su di un lato la Sedia Comoda e far girare la ruota. Controllate periodicamente la pressione delle gomme che deve essere circa 1,5 + 2,0 Bar.



FIG. 14



FIG. 15

BRACCIOLI

Per facilitare il trasporto della sedia comoda ed i trasferimenti del paziente tutti i braccioli delle carrozzine sono completamente estraibili. Per estrarre i braccioli tenere premuto il pulsante anteriore posto alla base del bracciolo e sollevare lo stesso (FIG. 16). Per il montaggio eseguire la stessa operazione facendo attenzione al perfetto bloccaggio del pulsante.



FIG. 16

WC

Utilizzare il WC con la sedia completamente frenata (FIG. 17). Per l'utilizzo del WC estrarre la parte del sedile asportabile tirando la maniglia presente sulla parte anteriore.

Estrarre il WC dalla parte posteriore affermandolo per l'impugnatura (FIG. 18).



FIG. 17



FIG. 18

ACCESSORI



RCR 115
Divaricatore
regolabile



RCR 110
Poggiatesta
regolabile



CBR 500
Tavolino
regolabile



RCR 100
Braccioli regolabili
in altezza

PULIZIA E MANUTENZIONE

Le Sedie Comode della linea **MOPEDIA by MORETTI** necessitano di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito vi elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente :

Elemento	Frequenza
Pressione delle gomme (dove previsto)	Mensile
Capacità frenante	Mensile
Pulizia della tappezzeria del sedile	Secondo necessità
Verifica generale da parte dipersonale qualificato	Biennale

Per la pulizia delle parti cromate e metalliche della Sedia Comoda usare acqua ed un sapone normalmente utilizzato per le auto.

La seduta e lo schienale possono essere puliti con una spugna inumidita e sapone neutro. Il WC deve essere regolarmente pulito e disinfettato utilizzando un normale disinfettante da bagno. Pulire sempre almeno prima di ogni impiego.

GARANZIA

Il prodotto è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Apparecchio tipo _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____

Località _____

Venduto a _____

Via _____

Località _____

FABBRICANTE: Moretti S.p.a.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.