

LINEA

Articolo

**488**

Categoria commerciale

**GINOCCHIERA CON POWER BAND TAPING INTEGRATO**

Colore di vendita

NERO

Taping GRIGIO

Comp. Tessile

Nylon 85%

Spandex 15%

Silicone 100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR	
S	39-45	L	45-51	XXL	51-57
M	42-48	XL	48-54		

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Asciugare disteso	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	Indossare dal piede e tirare verso l'alto.	Particolarmente indicata nelle attività sportive in fase di prevenzione o recupero dopo infortuni, nel post-operatorio.	Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione la ginocchiera non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.