

 MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	SCHEDA TECNICA FASCIA ERGONOMICA " SLING "	Rev. 0 GEN /2014
	DEMARTA VIRGINIO SAS Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	

DESTINAZIONE D'USO

La fascia ergonomica "SLING" permette il trasferimento di persone dal letto alla sedia a rotelle e viceversa, oppure dalla sedia a rotelle al sedile dell'auto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- La fascia è composta da un'anima di polietilene rivestita.
- Munito di quattro maniglie laterali imbottite e senza cuciture.
- Portata Trasferimento: 180 Kg.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Posizionare la fascia sulla zona lombare del paziente, Posizionarsi davanti al paziente e appoggiare le ginocchia a quelle del paziente. Tramite le maniglie, tirare verso di sé fino a che il paziente non sia in posizione eretta. Per farlo sedere, procedere al rovescio.

DIMENSIONI

60 x 20 cm.

MANUTENZIONE

Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcoolica.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il prodotto deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

CODICE ARTICOLO

03.04.3030

CODICE ISO: "Inesistente"

RDM: 99504/R

CND: Y0899

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE)
- Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012

