

**MANIGLIONE A VENTOSA
SUCTION GRAB BAR
BARRE D'APPUI À VENTOUSE
SAUGNAPFHALTEGRIF
TIRADOR DE VENTOSA
MANILHA A VENTOSA
ΛΑΒΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ**

مقبض محجمي كبير

REF 28972 - 28973 - 28974**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

دليل الإستعمال والرعاية



Fabbricante/Manufacturer:

GIMA S.P.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy

Made in P.R.C.

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.





- Il maniglione a ventosa non è progettato per sostenere o supportare tutto il peso corporeo.

- Il maniglione è stato progettato per assistere nei movimenti naturali quando si entra o si esce dalla doccia. Non sollecitare con strappi o altri movimenti impropri.

- Controllare sempre la tenuta e lo stato della ventosa attraverso l'apposita finestra, ogni volta prima dell'utilizzo.

- Non installare su superfici mobili.


- Portata massima: 60 kg (verticale); 45 kg (laterale).

- Solo per il codice prodotto 28974 - Portata massima: 85 kg (verticale); 60 kg (laterale)



Il costruttore non risponde di eventuali danni a persone o cose qualora il prodotto venga utilizzato per un uso non conforme o per usi non corretti o imprudenti.

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente su superfici lisce e non porose; su piastrelle, porcellana o fibra di vetro. Non installare su pannelli, legno o superfici verniciate o tappezzate.

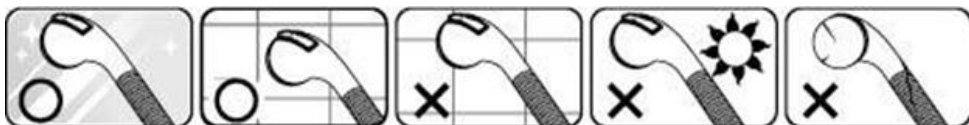

MONTAGGIO

1. Pulire accuratamente la superficie con una salviettina imbevuta d'alcool, attendere che la superficie sia asciutta. Controllare lo stato della ventosa. Non utilizzare in caso il dispositivo risulti danneggiato, incrinato o presenti fessurazioni.

2. Sollevare entrambe le leve, posizionare il maniglione a ventosa in modo che entrambe le ventose poggino saldamente e completamente su una superficie liscia.

3. Impugnare un'estremità e spingere la leva con il palmo della mano. Si dovrebbe percepire una leggera resistenza quando la ventosa aderisce alla superficie.



SMONTAGGIO

1. Sollevare entrambe le leve.


2. Se persiste l'aderenza, sollevare delicatamente un'estremità con un dito.

3. Non utilizzare uno strumento appuntito poiché potrebbe danneggiare la ventosa.

4. Mantenere entrambe le leve sollevate fino all'utilizzo successivo.

INDICATORE MONTAGGIO VENTOSA BREVETTATO

“VERDE” significa montaggio corretto, in caso contrario, la finestra diventerà di colore „ROSSO“. Il rosso indica la necessità di controllare la superficie e rimontare il dispositivo. Non posizionare in prossimità di giunture o fessure.

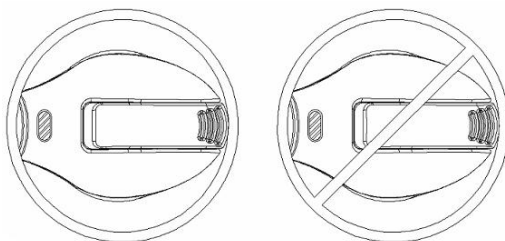

“VERDE” = OK

“ROSSO” = RIMONTARE

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione.

La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato.

I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.

REF 28972



REF 28973





REF 28974