



## ISTRUZIONI PER L'USO

-1° *passo*: Avvitare le due gambe presenti nella confezione al sedile fino al raggiungimento della perfetta stabilità del prodotto.

-2° *passo*: come illustrato nella foto va tarato il pistone in base al peso dell'utilizzatore, in modo che la discesa sia più delicata e che il sedile abbia sufficiente forza per aiutare il sollevamento dell'utilizzatore.



Attenzione: in cima al pistone è presente un pulsantino che premendolo consente di estrarre il gancio e inserirlo nella fessura adatta (freccia rossa).

-3° *passo*: Attraverso i due ferretti presenti sul sedile, montare la copertura sopra l'asse di metallo.



-4° *passo*: Sedersi sul sedile e scendere fino al momento in cui non si sente il "click", a quel punto la seduta sarà bloccata.

-5° passo: per alzarsi premere il pulsante che si trova sulla sinistra in modo da sbloccare la seduta.

