


Mepilex® Border Lite

MEDICAZIONE ASSORBENTE, SOTTILE, IN SCHIUMA DI POLIURETANO, CON BORDO

- Minimizza il dolore al paziente ed i traumi alla ferita ai cambi di medicazione^{1,2}
- Gestisce efficacemente gli essudati
- Garantisce un fissaggio sicuro ed una rimozione atraumatica
- È impermeabile

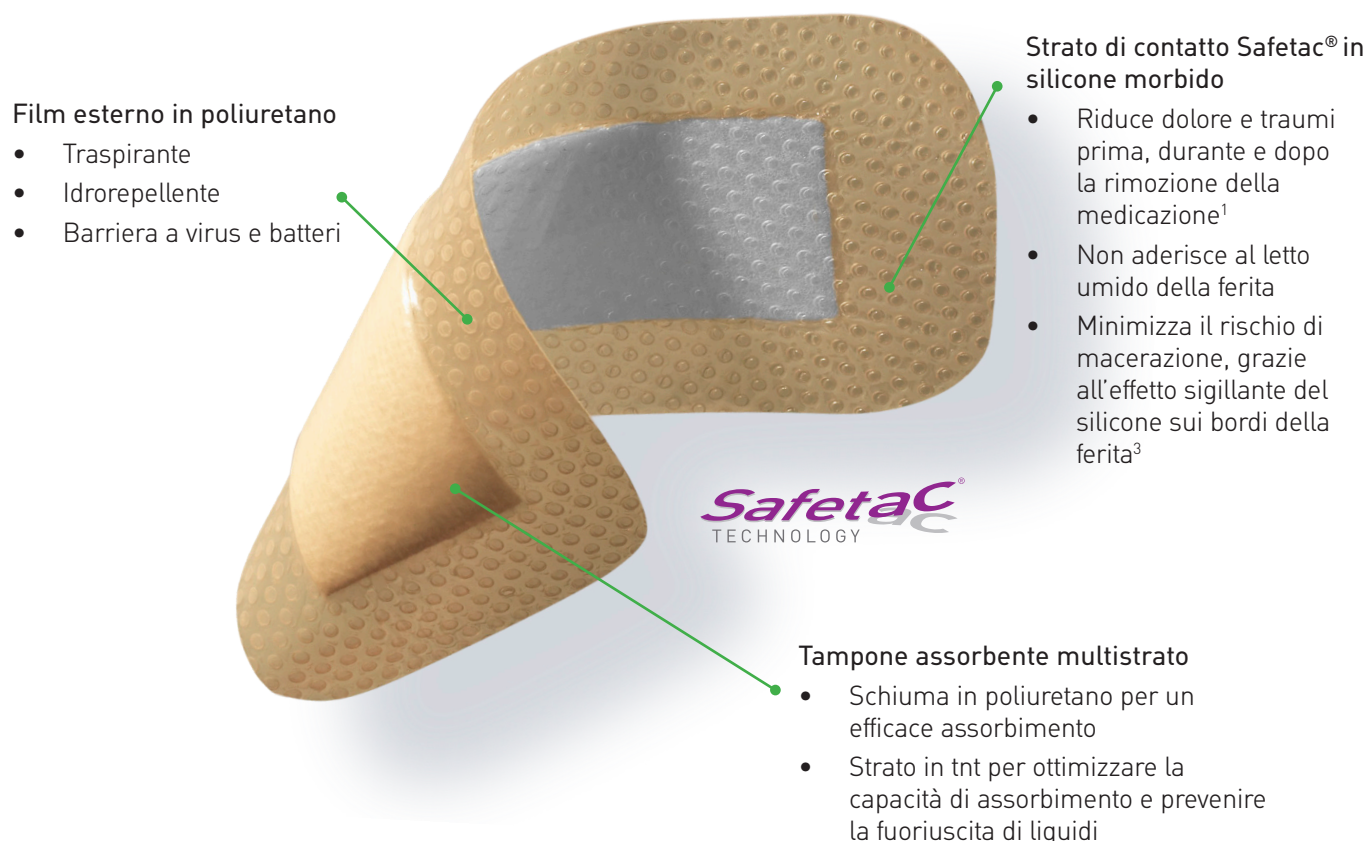


Tecnologia Safetac®


Tecnologia Safetac®. Minimizza traumi e dolore.

Safetac è una tecnologia brevettata che minimizza il dolore al paziente ed i traumi alla lesione. La Tecnologia Safetac è presente esclusivamente nelle medicazioni Mölnycke Health Care della famiglia Mepilex®, Mepitel®, Mepiform®, Mepitac®.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.molnycke.com

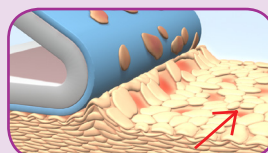


Con un adesivo tradizionale si verifica l'asportazione di cellule epidermiche

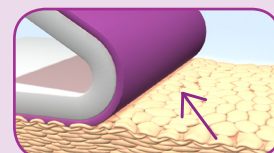


Con la Tecnologia Safetac non si verifica l'asportazione di cellule epidermiche

Come si usa Mepilex® Border Lite

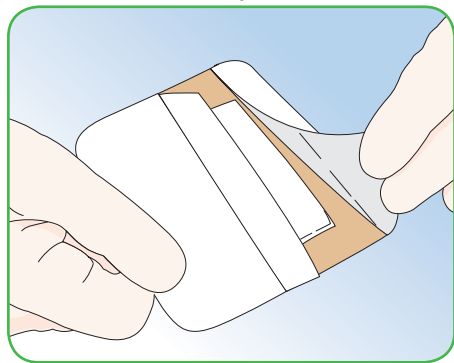

Detergere la ferita. Rimuovere una parte della pellicola protettiva

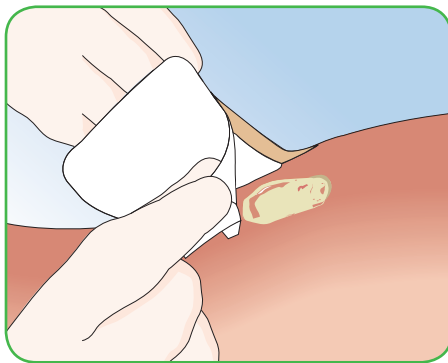

Applicare la parte esposta sulla ferita e rimuovere la restante pellicola protettiva.
Non tendere la medicazione durante l'applicazione.

Come agisce Mepilex Border Lite

Mepilex Border Lite è una medicazione sottile "all-in-one" in schiuma di poliuretano, che assorbe e trattiene gli essudati, mantenendo l'ambiente umido della ferita. Lo strato di contatto Safetac sigilla i margini della ferita, evitando che l'essudato fuoriesca verso la cute perilesionale e minimizzando quindi il rischio di macerazione. L'esclusiva Tecnologia Safetac garantisce la rimozione atraumatica per la ferita e per la cute perilesionale e non causa dolore aggiuntivo al paziente.

Benefici di Mepilex Border Lite

- Minimizza i traumi alla ferita ed il dolore per il paziente ai cambi di medicazione
- Non necessita di fissaggio ulteriore
- E' idrorepellente
- Può essere utilizzata sotto bendaggio elastocompressivo
- Sottile e facile da applicare, per il comfort del paziente
- Può rimanere in situ per più giorni, in base alle condizioni della ferita
- Può essere rimossa e riposizionata senza perdere la sua caratteristica microaderenza selettiva
- Basso rischio di reazioni allergiche ed irritazioni cutanee

Aree di utilizzo

Mepilex Border Lite è ideale per un'ampia gamma di ferite essudanti, quali ulcere degli arti inferiori e del piede diabetico, ulcere da pressione, lesioni da trauma, come lacerazioni e ferite che guariscono per seconda intenzione.

Note

In caso di segni clinici di infezione, consultare il medico per un trattamento antibiotico appropriato.



MEPILEX BORDER LITE (confezionamento sterile in busta singola)

Articolo	Misura cm	Pezzi dispenser	Pezzi cartone
281000	4 x 5	10	70
281100	5 x 12,5	5	65
281200	7,5 x 7,5	5	70
281300	10 x 10	5	50
281500	15 x 15	5	50