

Specifiche tecniche (soggette a modifica senza preavviso!)

| Dimensioni | | Dijon | Brest | Lyon |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Altezza seduta (var.) | cm | 42 - 57 | 42 - 57 | 42 - 57 |
| Altezza seduta (fissa) | cm | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Altezza con braccioli | cm | ----- | 61 - 76 | ----- |
| Altezza con braccioli | cm | ----- | ----- | 83 - 98 |
| Larg.zza sedile (LxLa) | cm | 46 x 40 | 46 x 40 | 46 x 40 |
| Area occupata | cm | 45 x 51 | 45 x 59 | 51 x 59 |
| Reg.ne altezza seduta | | 7 punti/ea. 25 mm | 7 punti/ea. 25 mm | 7 punti/ea. 25 mm |
| Peso | kg | 3.0 | 3.8 | 5.0 |
| Peso (paziente) | kg | max. 130 | max. 130 | max. 130 |

Parti di ricambio

| Articolo No. | Nome | Note / Colore |
|--------------|---|------------------|
| 463.90.20 | Braccioli (incl. clips) | Plastica, bianco |
| 463.90.30 | Schienale (incl. clips) | Plastica, bianco |
| 463.90.40 | Dado di raccordo | Plastica, bianco |
| 201.90.28 | Clips per gambe (regolazione altezza) | Rotondo, bianco |
| 463.90.60 | Clips per collegare braccioli e schienale | Quadrato, rosso |
| 442.00.25 | Innesto per tubo | Plastica, nero |
| 456.00.25 | Puntale gamba | Plastica, bianca |

Accessori

| | | |
|-----------|----------------------------|------------------|
| 284.00.30 | Borsa da trasporto | tessuto, nero |
| 301.00 | Bacinella toilette, grigio | Plastica |
| 309.90 | Ricettacolo | Plastica, bianca |
| 440.10.62 | Sedile in PUR | nero |

Re-impiego

Il prodotto è concepito per essere riutilizzato. Il reimpiego (vita) dipende dallo stato del prodotto. Prima del reimpiego, è necessario effettuare la manutenzione e verificare le istruzioni di sicurezza, cura e manutenzione. .

La verifica deve escludere un possibile uso inappropriato causato da danni evidenti o invisibili. Fate riferimento alla direttiva sui dispositivi medici (DDM).

Durata del prodotto

La durata attesa dei prodotti indicati in questo manuale, se usati in base alle istruzioni di sicurezza, intervalli di manutenzione e cura, è di **3 anni**. Oltre questo periodo, il prodotto può essere usato solo in condizioni sicure. La manutenzione deve essere eseguita almeno ogni sei mesi. Impieghi specifici del deambulatore, dovuti alle necessità dell'utente, potrebbero rendere necessari intervalli di manutenzione più brevi.

Garanzia

I prodotti indicati in questo manuale hanno una garanzia di **24 mesi**. Parti usurate e danni conseguenti a uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Avviso!

Potete trovare questo manuale di istruzioni (GB) su www.rebotec.de.

Potete stamparlo e consultarlo quando necessario.

Fabbricante: REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH, DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59



Manuale utente

BA No.: 02.08.077/12-15



CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 – 33100
UDINE (Italy)
Tel. ++39 0432 621621
Fax ++39 0432 621620
www.chinesport.it

No. serie / Prodotto



Ausili da comodo

Sgabello da comodo

“Dijon“

Art. No.: 362.00.10



Sedile da comodo

“Brest“

Art. No.: 362.00.20



Sedia da comodo

“Lyon“

Art. No.: 362.00.30



Uso previsto / avviso agli utenti

Gli ausili da comodo possono essere impiegati solo in interni, su superfici solide e regolari, per fare la doccia. Fornisce un aiuto a persone con limitazioni fisiche incrementandone l'indipendenza durante la doccia. Non ostante il buon confort, la sedia non è adatta per rimanerci seduti a lungo.

Avviso!

Conservate il manuale per impieghi futuri.


Uno stesso numero di serie è stampato sul manuale istruzioni e sull'etichetta del prodotto. In caso di reclami e domande, comunicate sempre il numero di modello, di serie e la versione del presente manuale BA No.

Avvertenze sul prodotto

La struttura è fatta di tubolari di alluminio. L'altezza della seduta è regolabile (su 7 posizioni) usando il tubolare telescopico. Una versione con sedile non regolabile in altezza è disponibile come opzione (tubolare singolo). I puntali delle gambe sono fatti in plastica antiscivolo. L'ausilio da comodo può essere interamente assemblato o disassemblato con il sistema delle clip, ed offre quindi una buona mobilità per cambiare luogo.



Primo impiego

L'ausilio da comodo non è spedito pronto per l'uso. Deve essere assemblato prima del primo impiego. Utilizzando la lista parti, verificate di avere ricevuto tutti i pezzi prima di iniziare il montaggio. I pezzi variano in base al modello!

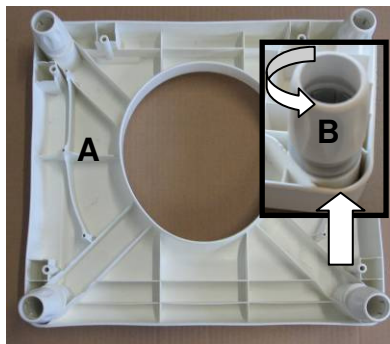

Modello Dijon


- Ponete la seduta (A) su una superficie regolare.
- Allentate il dado di raccordo (B) girando a sinistra (antiorario).
- Inserite il tubolare (C) nell'elemento di bloccaggio (D) fino in fondo.
- Ruotate il tubolare in modo che la clip (F) sia rivolto all'esterno. Assicuratevi che tutte le gambe siano installate nella stessa maniera!
- Stringete il dado (B) girando a destra finché non è stretto.
- Installate le tre altre gambe nello stesso modo.
- Estraeate la clip (F) completamente e regolate l'altezza del sedile estraendo il tubolare.
- Inserite la clip (F) nel foro del tubolare.
Attenzione! Inserite la clip fino in fondo. Vi accorgete quando la clip è completamente inserita nel tubolare.
- **Regolate tutte le 4 gambe alla stessa altezza.**
- Dopo il montaggio, verificate la stabilità dell'ausilio!

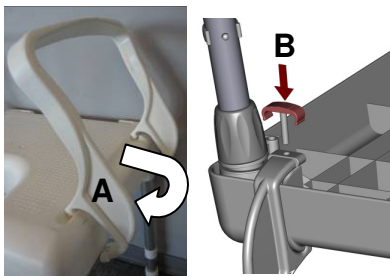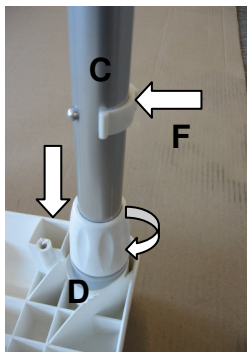

Modello Brest

Assemblaggio come modello Dijon.

- Fissate i braccioli (A) al sedile. Assicuratevi che il morsetto si agganci sotto il sedile.
- Spostate i braccioli fino a sovrapporli ai fori e fissateli con le clip (B).
- **Attenzione! Inserite la clip fino in fondo!**

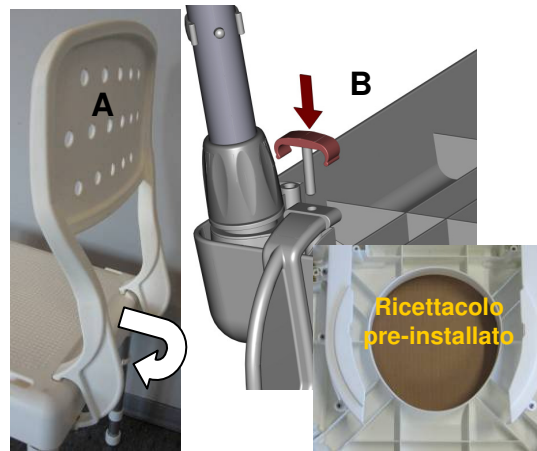

Modello Lyon (con ricettacolo)

Assemblaggio come modello Dijon

- Assemblaggio braccioli come modello Brest.
- Fissate i braccioli (A) al sedile. Assicuratevi che il morsetto si agganci sotto il sedile.
- Fissate lo schienale usando la clip (B).
- **Attenzione! Inserite la clip fino in fondo!**

Pulizia e disinfezione

La sedia può essere pulita con un comune detergente domestico presente in commercio. Non impiegate detersivi aggressivi o schiumosi. Per disinfettare la superficie usate un comune disinfettante domestico presente in commercio (seguite le istruzioni). Risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno. Una cura o manutenzione inadeguate limitano o annullano la responsabilità del fabbricante.

Manutenzione

Una manutenzione regolare assicura un impiego affidabile per lungo tempo. Per sicurezza e per prevenire incidenti dovuti ad usura nascosta o a danni da uso improprio, assicuratevi di fare revisionare l'ausilio docci almeno una volta ogni sei mesi da un rivenditore autorizzato



Avvisi di sicurezza

- **Non eccedere la portata massimo consentita!**
- Verificate la presenza di danni sull'ausilio prima di ogni impiego. Se individuate danni, non usate lo sgabello!
- **Pericolo di ribaltamento!**
- Prima dell'utilizzo verificate:
 - ✓ La stabilità dell'ausilio (dopo l'assemblaggio e prima del primo impiego).
 - ✓ Eventuali danni al sedile.
 - ✓ La stabilità delle clip di regolazione dell'altezza.
 - ✓ In base al modello, la sicurezza delle clip dei braccioli e dello schienale.
- Non trasportare la sedia se il paziente vi è seduto.
- Utilizzare l'ausilio solo in interno, su superfici solide e regolari.
- In base al modello assicuratevi che braccioli e schienale siano utilizzati solo se assicurati alla struttura.
- Non sbilanciatevi troppo all'indietro sullo sgabello.