


AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Intermed srl non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE E INDICAZIONI

Il kit antidecubito Taurus IV (compressore e sovrasmaterasso) è indicato per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

FUNZIONI DEL PRODOTTO

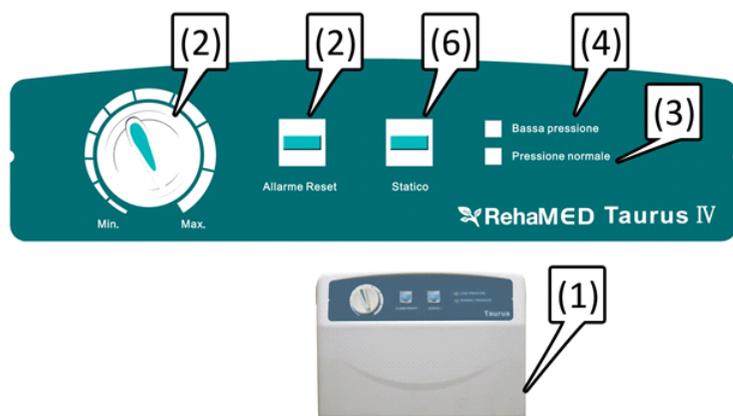

Tasto di accensione (1) [Power]

- L'accensione è posizionata sul lato destro del compressore.
- Premendo il tasto ON/OFF e il pulsante di alimentazione sul pannello, il compressore si avvia o si arresta.

Regolatore della pressione di lavoro (2)

- Ruotare il regolatore per impostare il livello di pressione desiderato.

Indicatore pressione normale (3)

- Un indicatore verde indica che il materasso ha raggiunto la pressione normale di esercizio.

Indicatore bassa pressione (4)

- Un indicatore giallo o rosso avverte quando il valore di pressione risulta essere al di sotto del livello impostato.

Tasto spegnimento allarme (5)

- Un allarme sonoro e visivo si attiva quando il materasso scende al di sotto del valore di pressione impostato. Per silenziare l'allarme premere il pulsante dedicato, l'allarme visivo continuerà ad essere visibile fino a quando il problema non verrà risolto.
- Premere nuovamente il pulsante "Spegnimento allarme" per riattivare gli allarmi.

Tasto Funzione statica (6) [Statico]

- Premere il pulsante per impostare la modalità statica.

MODALITA' D'IMPIEGO

1. Posizionare il compressore su un piano orizzontale o ancorato al letto.
2. Aprire il materasso sul letto e fissarlo allo stesso con i lembi dedicati.
3. Collegare i tubi di ingresso aria al compressore, assicurandosi che gli stessi non siano attorcigliati.
4. Accendere il compressore, il quale inizierà a gonfiare il materasso.
5. L'indicatore di bassa pressione, durante il gonfiaggio, sarà attivo.
6. L'allarme acustico non si attiverà per i primi 40 minuti e verrà attivato se la pressione è ancora bassa all'interno del materasso. In caso di bassa pressione, premere il pulsante Spegnimento allarme per disattivare l'allarme acustico, e il suo indicatore continuerà a lampeggiare.
7. Per il primo gonfiaggio si consiglia di premere sul pulsante Funzione statica per velocizzare il gonfiaggio.
8. Quando la pressione di gonfiaggio raggiunge i livelli stabiliti, dopo circa 30 minuti, si attiverà l'indicatore di Pressione normale e si spegnerà l'indicatore di Bassa pressione.
9. Ruotare il regolatore di pressione per impostare il livello di pressione desiderato.
10. Premere il pulsante Funzione statica, tale funzione si attiverà dopo circa 6 minuti. Premere nuovamente il pulsante Funzione statica per passare alla modalità ciclo alternato.

NOTA: Nella modalità statica, il materasso fornisce una superficie solida che rende più facile trasferire o riposizionare il paziente. La modalità statica impedisce al paziente di schiacciare il materasso quando è in posizione seduta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore - Codice: AK-906C	Materasso - Codice: AK-906M
Tensione di alimentazione: 220 V - 50 Hz, 1 A	Dimensioni: 198 x 88 x 11 cm
Portata d'aria: 7-8 litri al minuto	Valvola CPR
Pressione: 30-60 mmHg	Funzione cuscino
Ciclo lavoro: 12 minuti	Connettori a sgancio rapido
Avvisi: bassa pressione pressione normale	Con perdita d'aria
Modalità allarme silenziato	18 elementi
Modalità statica	Fodera: Blu in Nylon/PU
Dimensioni: 28 x 20 x 10 cm	Elementi in Nylon/PVC
Peso: 2,2 kg	Base: Nylon / PVC

PULIZIA DEL MATERASSO

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Dispositivo non autoclavabile.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.




ISTRUZIONI PER L'USO

Revisione 00, 06 giugno 2015

KIT ANTIDECUBITO TAURUS IV COMPRESSORE CON REGOLATORE E SOVRAMATERASSO A ELEMENTI INTERCAMBIABILI

AK-906

Codice Nomenclatore 03.33.06.021

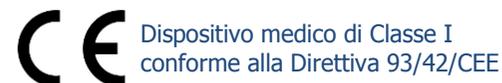

Made in China



via Ludovico d'Aragona, 11 - 20132 - Milano (MI) Italy
Tel. +39 02 98 24 80 16 - Fax +39 02 98 24 73 61
www.intermeditalia.it - info@intermeditalia.it