



Collare cervicale in gommapiuma.

**NECKOK**

Art. TO0100

**La cura del collo in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole**

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico ideale per stabilizzare il tratto cervicale. La struttura in gommapiuma e la forma anatomica agevolano il rilassamento della muscolatura cervicale, garantendo benessere a tutta la zona trattata. Leggero, confortevole e facile da indossare, non compromette in alcun modo la respirazione e la circolazione sanguigna.

#### CARATTERISTICHE

Struttura in gommapiuma semirigida.  
Rivestimento in maglia tubolare anallergica.  
Chiusura posteriore a velcro.  
Radiotrasparente.

#### INDICAZIONI

LIEVI DISTORSIONI DELLA COLONNA CERVICALE  
(COLPO DI FRUSTA) • TORCICOLLO •  
ARTROSI CERVICALE • CRISI VERTIGINOSE DI ORIGINE CERVICALE.

#### APPLICAZIONE

1. Posizionare la parte concava verso l'alto e lasciare i velcri di chiusura verso l'esterno.
2. Adagiare il mento sulla concavità
3. Chiudere il collare con il velcro, quanto basta

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L' applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

#### GARANZIA

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura.

TENORTHO SRL UNIPERSONALE  
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)  
Tel. +39 039 8943960  
Fax. +39 039 8943689  
www.tenortho.com  
info@tenortho.com

Presenza di marcatura CE, che attesta  
la conformità alla direttiva europea  
93/42/CEE.

Emissione in data 01 - 12 - 2016  
Revisione 1

