



TENORTHO
Un punto fermo per tornare a muoversi

CROCERA MODULARE CON SCARICO ASCELLARE E PRESA DI BACINO

TO.LO.SA®

ART. TO1304

DESCRIZIONE

Crocera modulare con scarico ascellare e presa di bacino.
Completa il prodotto il busto TO1201 HE – TAV per TO.LO.SA.

CARATTERISTICHE

Telaio realizzato in lega leggera d'alluminio.
Busto TAV semirigido con chiusura anteriore a velcro e sistema di tiranti elastici.
Pelotte delta-pettorali imbottite.
Montanti ascellari scaricati e regolabili in altezza.
Astine di collegamento iliaco-ascellare disponibili a richiesta.

INDICAZIONI

Fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi • Spondilodisciti • Spondilartrosi
• Dorso curvo e cifosi dorsale.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.