



TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi

Immobilizzatore di spalla.

NOLUX

Art. TO2102

**La cura della spalla in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura caratterizzata da un reggi braccio in cotone al 100%, una fascia d'accoppiato con chiusura a velcro per una stabilizzazione più definita ed i tiranti regolabili ad ogni singola misura, permettono un'applicazione immediata evitando ulteriori complicazioni. Facile da indossare, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Tessuto in cotone al 100%. Tiranti regolabili in lunghezza. Regolazione a mezzo velcro
Fascia in accoppiato con chiusura a velcro per stabilizzazione finale. Universale.

INDICAZIONI

FRATTURE COMPOSTE DELL'OMERO • DISTORSIONI DELLA SPALLA • LUSSAZIONI GLENO-OMERALI • POST-OPERATORIO DELLE TENORRAFIE DEL CAPO LUNGO DEL BICIPITE.

APPLICAZIONE

- 1 Infilare il braccio nella sacca.
- 2 Regolare i tiranti tramite le apposite fibbie scorrevoli.
- 3 Incrociare i tiranti posteriormente e portarli fino a raggiungere i passanti della tasca reggi braccio e fissandoli sul velcro asola della tasca.
- 4 Mantenere il braccio in una posizione di 90°.
- 5 Fissare la fascia in tessuto accoppiato bianco sulla porzione di velcro asola presente sulla sacca.
- 6 Concludere girando la fascia intorno al braccio da immobilizzare e fissandola su se stessa con l'apposito velcro di chiusura.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritta dal medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.