

Tutore per abduzione spalla a 10°-15°

TEN-ABD 10

Art. TO2104

**La cura della spalla in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

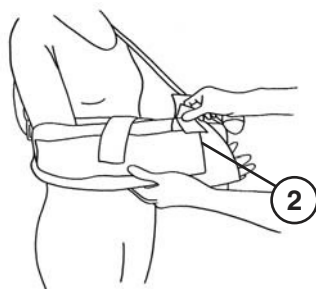


Fig.5

DESCRIZIONE

È un supporto medico-ortopedico, progettato per garantire il massimo controllo, invitando il corpo ad una corretta immobilizzazione della spalla. Grazie alla struttura ed allo studio effettuato sui tiranti, ogni centimetro del tutore aderisce perfettamente al corpo, procurando un piacevole senso di sicurezza e benessere. La sacca reggi braccio in materiale "FRESHNET" è traspirante al 100% e la pallina riabilitativa ergonomica, è studiata per seguire esattamente le linee anatomiche della mano durante il movimento riabilitativo.

CARATTERISTICHE

Abduzione 10°-15°. Ambidestro. Tessuto velcrabile di copertura per l'espanso. Tessuto "Freshnet" per la sacca reggi braccio, traspirante al 100%. Tiranti regolabili per un sostegno personalizzato. Fibbie di chiusura a sgancio centrale così che la regolazione delle cinghie possa essere effettuata una volta sola. Tutore a cuscino in espanso conformato anatomicamente a doppia sponda, per una migliore stabilizzazione. Asola per appoggio pollice.

INDICAZIONI

RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI • INTERVENTO DI BANKHART • SUBLUSSAZIONI • DISLOCAZIONI • RIPARAZIONE TESSUTI MOLLI POST TRAUMA.

APPLICAZIONE

- 1 Posizionare il cuscino sul fianco in prossimità della cresta iliaca. (fig. 1)
- 2 Fissare il tirante girovita con la fibbia a scatto (regolare la tensione quanto serve, se necessario accorciare) (fig. 1)
- 3 Posizionare la sacca reggi braccio in modo che le superfici velcrabili (maschio/femmina) combacino garantendo il fissaggio. (fig. 2)
- 4 Fissare la cinghia della sacca reggi braccio alla base del cuscino in modo che la spalla venga immobilizzata quanto serve (regolare la tensione, se necessario accorciare). (fig. 3)
- 5 Utilizzare i cinturini 1e 2 per fissare ulteriormente l'estremità superiore della sacca al cuscino, disponendoli all'altezza del polso e dell'avambraccio. (fig. 4-5)

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.

Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.