



Ginocchiera elastica aperta con aste articolate

GENUTONIC

ART. TO3117

La cura del ginocchio in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione. La struttura realizzata in tessuto elastico traspirante calibrato, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione. Facile da indossare, ottima vestibilità, non presenta nessuna cucitura nel cavo popliteo, assicurando il massimo comfort. La struttura è realizzata in "Resistex combinato" con filo di carbonio: antistatico, traspirante, termoregolatore, batteriostatico, ipoallergenico e performante (durante l'attività fisica diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare). L'apertura frontale rende più agevole l'applicazione. Le aste policentriche garantiscono un'ottima tenuta latero-mediale e sono facilmente estraibili per essere adattate secondo l'anatomia del paziente.

CARATTERISTICHE

Tessuto con fibra di carbonio Resistex, elastico e 100% traspirante. Stabilizzatore rotuleo anatomico in materiale atossico. Aste articolate policentriche in alluminio. Nessuna cucitura nel cavo popliteo. Apertura frontale.

INDICAZIONI

TRAUMI DISTORSIVI DEL GINOCCHIO • CONDROMALACIA ROTULEA ASSOCIATA A LASSITÀ LEGAMENTOSA • STABILIZZAZIONE LATERO-MEDIALE • PREVENZIONE DEI TRAUMI DISTORSIVI • INSTABILITÀ ARTROSICA • COADIUVANTE NELLA TERAPIA DEL GINOCCHIO ARTROSICO NON OPERABILE • PREVENZIONE NELLA PRATICA SPORTIVA • PATOLOGIA DEL GINOCCHIO SENILE

APPLICAZIONE

1. Aprire le 4 alette frontali
2. Applicare la ginocchiera allacciando prima le due alette di chiusura interne, avendo cura di mantenere il logo in gomma nella parte alta e centrando bene la rotula nell'apertura centrale.
3. Chiudere le ulteriori alette esterne di regolazione.

NB: Se necessario modellare leggermente le aste in alluminio, in modo da seguire al meglio l'anatomia della gamba.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.