

## Ginocchiera elastica con fibra di carbonio e taping integrato

 Knee®

ART. TO3111

### La tecnologia del carbonio, la praticità del taping integrato.

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione in fase attiva.

La struttura in fibra di carbonio garantisce le proprietà biologiche quali ossigenazione ed accelerazione dell'attività cellulare) mentre i tiranti elastici garantiscono l'effetto taping.

#### CARATTERISTICHE

Tessuto elastico con filo di carbonio per garantire le proprietà biologiche del tutore. Tiranti elastici per ottenere l'effetto taping in fase attiva.



#### INDICAZIONI

Esiti distorsioni • Edema • Versamento articolare (Post-traumatico, Artrosico / degenerativo, Artritico) • Borsiti rotulee • Tendiniti (Rotulee, Quadricipitali, Zampa d'oca) • Cisti di Baker • Osteocondriti (Osgood – Schlatter, Sinding – Laarsen).

#### APPLICAZIONE

1. Afferrare il tutore C Knee con due mani avendo cura di mantenere i tiranti elastici sul lato anteriore;
2. Ripiegare verso l'esterno la parte alta del tutore, di modo che le bande di silicone non ostacolino la salita del tutore;
3. Infilare il C Knee avendo cura di posizionare la rotula esattamente al centro degli incroci dei tiranti elastici;
4. In caso di discesa del tutore usufruire della fascetta di ancoraggio opzionale (coscia).

NOTA: nella fase acuta, è possibile coadiuvare l'effetto del tutore TO3111 C Knee con il cinturino sottorotuleo TO3101 T&ON®.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.