

REF 688	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 23/05/2018
CINGHIE FERMABRACCIA E CAVIGLIE (2 PEZZI).			
MISURA: UNICA.		COLORE: ECRU'	
COMPOSIZIONE: GALLONE 100% COTONE - OCCHIELLI OTT/NK- NASTRO UNCINO 100%PA.		CONFEZIONE: IN SACHETTO DI PLASTICA	
LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE	
ISTRIZIONI: 1- AVVOLGERE LA FASCIA MORBIDA ATTORNO AL POLSO/CAVIGLIA FISSANDOLA CON IL VELCRO. 2- FAR PASSARE IL TIRANTE CON OCCHIELLI NELLA FIBBIA PASSANTE 3- FISSARE LE ESTREMITA' AL MONTANTE DEL LETTO CHIUDENDOLE CON GLI APPOSITI BOTTONI (Cod. 690M E COD 691M venduti a parte		INDICAZIONI INDICATO PER LIMITARE IL MOVIMENTO DELLA GAMBE DI PAZIENTI AGITATI, IN MODO DA EVITARE DANNI ALLA PERSONA O AD ALTRI. SOLO L'OPERATORE PROVVISIO DELLA CHIAVE MAGNETICA (COD.691M) PUO' LIBERARE IL PAZIENTE .UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE SANITARIO SPECIALIZZATO	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE DIETRO PRESCRIZIONE MEDICA DA PERSONALE SANITARIO SPECIALIZZATO. <u>IN CASO DI URGENZE AVERE SEMPRE A PORTATA DI MANO UNA FORBICE O COLTELLO PER TAGLIARE LA CINTURA.</u>		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO.	
NECESSARIO:  2 bottoni 690M + chiave 691M	688 N° progressivo: 141741 GMDN: 35304 CND: V0804		