



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA CARROZZINA VALUE - 4 RUOTE VALUE WHEELCHAIR STRETCHER - 4 WHEELS

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I. Parametri tecnici:

1. Dimensioni da piegata: 92 x 52 x 16 cm
2. Piegata in sedia a rotelle: *altezza dello schienale*: 91cm - larghezza: 50 cm
seduta: altezza: 49 cm - larghezza: 50 cm
3. Peso netto: 8 kgs

II. Metodo operativo:

1. Questo modello è dotato di una lega di alluminio di alta qualità e di pelle Oxford. Per rendere più sicuro il trasporto del paziente, in dotazione ci sono delle cinture.
2. Aprire la barella per sedia a rotelle e tirare la parte 4 e spingerla verso il basso, dopo averla regolata, premere verso il basso la parte 2, fino al punto stabilito, la sedia a rotelle si bloccherà automaticamente.
3. Premere il pulsante sulla parte 2, la maniglia può essere tirata fuori e spinta indietro a piacimento. Premere la parte 3, è possibile chiudere la maniglia nella parte posteriore.
4. Per piegare la barella per sedia a rotelle, sollevare la parte 1, salire su una delle guide poste davanti alle rotelle, nel frattempo sollevare la parte 4 e quindi piegare la barella.

III. Modalità di montaggio:

Questo modello si usa principalmente in aree caratterizzate da un traffico o accesso difficile, come corridoi stretti, cancelli, cortili o alcune zone di passaggio.

IV. Manutenzione:

1. Mantenere la pulizia, antisepsi inclusa.
2. Verificare la presenza di eventuali parti della barella allentate.

V. Attenzione:

Durante il trasporto del paziente, assicurarsi che ogni parte funzioni bene e allacciarsi la cintura.

VI. Conservazione e trasporto:

1. Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non soggetto ad erosione.
2. Questo prodotto può essere trasportato da un veicolo di trasporto ordinario.

VII. Imballaggio e accessori:

1. Questo prodotto è imballato completamente in una confezione singola.
2. Accessori: certificato di idoneità e foglio catarifrangente.

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Numero di lotto		Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Data di fabbricazione		Identificativo unico
	Importato da				

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
 No.999 Hongqi Road, Changyinsha
 Modern Agricultural Demonstration Area,
 Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
 Made in China

Gima 34073

REF

TD010114A

EC REP

SUNGO Europe B.V.
 Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

