


GUIDA RAPIDA


2019-nCoV Saliva Ag EASY TEST

(Immunocromatografico)

RACCOLTA DEL CAMPIONE

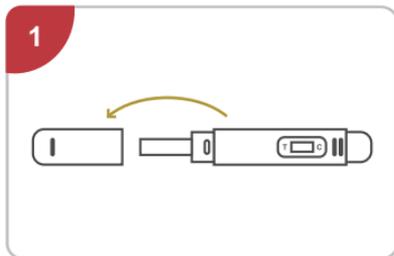

Aprire la busta di alluminio ed estrarre il test

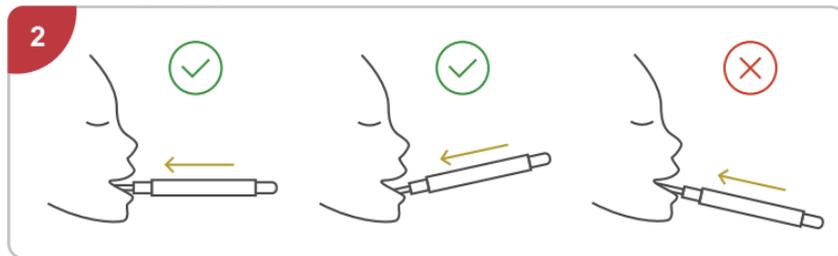


Inserire la parte assorbente in bocca. Assicurarsi che il test sia in posizione orizzontale..

Strisciare la parte assorbente sulle pareti della bocca e sulla lingua per raccogliere la saliva.

NOTE:


- * Durante il campionamento imbroccare il tampone gentilmente e lasciare che la saliva venga assorbita naturalmente.
- * Non fumare, bere o mangiare nulla almeno 30 minuti prima del test.
- * Qualunque campione di saliva è appropriato per il test ma si raccomanda di eseguire il campionamento alla mattina prima di avere sciacquato la bocca, mangiato o bevuto.

PROCEDURA DEL TEST

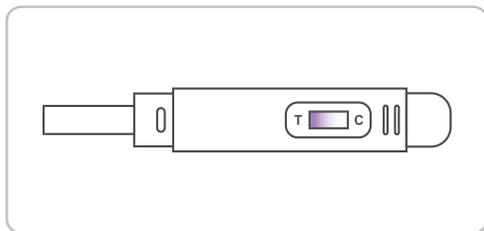

Estrarre la parte assorbente dalla bocca quando compare una banda violacea muoversi nella finestra centrale

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

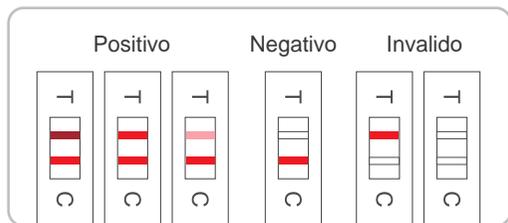

Leggere i risultati dopo 10 minuti.
Risultati letti prima di 10 minuti possono portare a falsi negativi.
Risultati letti dopo 10 minuti possono portare a falsi positivi.



Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD
Room 218, Building 2, No.68, Nanxiang Road,
Science City, Huangpu District, 510000,
Guangzhou P.R.China

Tel.: +86-020-82557192
Email: service@dochebio.com
www.dochebio.com



CMC Medical Devices & Drugs S.L
C/Horacio Lengo N° 18, CP 29006,
Málaga, Spain
Tel.: +34951214054
Fax: +34952330100
Email: info@cmcmedicaldevices.com



No.: DC-IN-0674C01 Ver 2.0 IT
Rel.:2021/04/01

物料编码	02.22.011.1		
物料名称	2019-nCoV Saliva Ag EASY TEST(Immunochromatography) 操作卡		
规格型号	180x120 mm	颜色	
版本	Ver2.0	材质	
语言	英语	申请人	
申请日期	2021.05.11	设计师	张玉菊
变更内容	Easy Test 改EASY TEST		

总经办		国际营销部		技术部		质量部	
日期		日期		日期		日期	