



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **BARELLA TRENDELENBURG TRENDELENBURG PATIENT TROLLEY**



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

M27850-M-Rev.2-07.20

**REF**


**27850**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy



**MD**



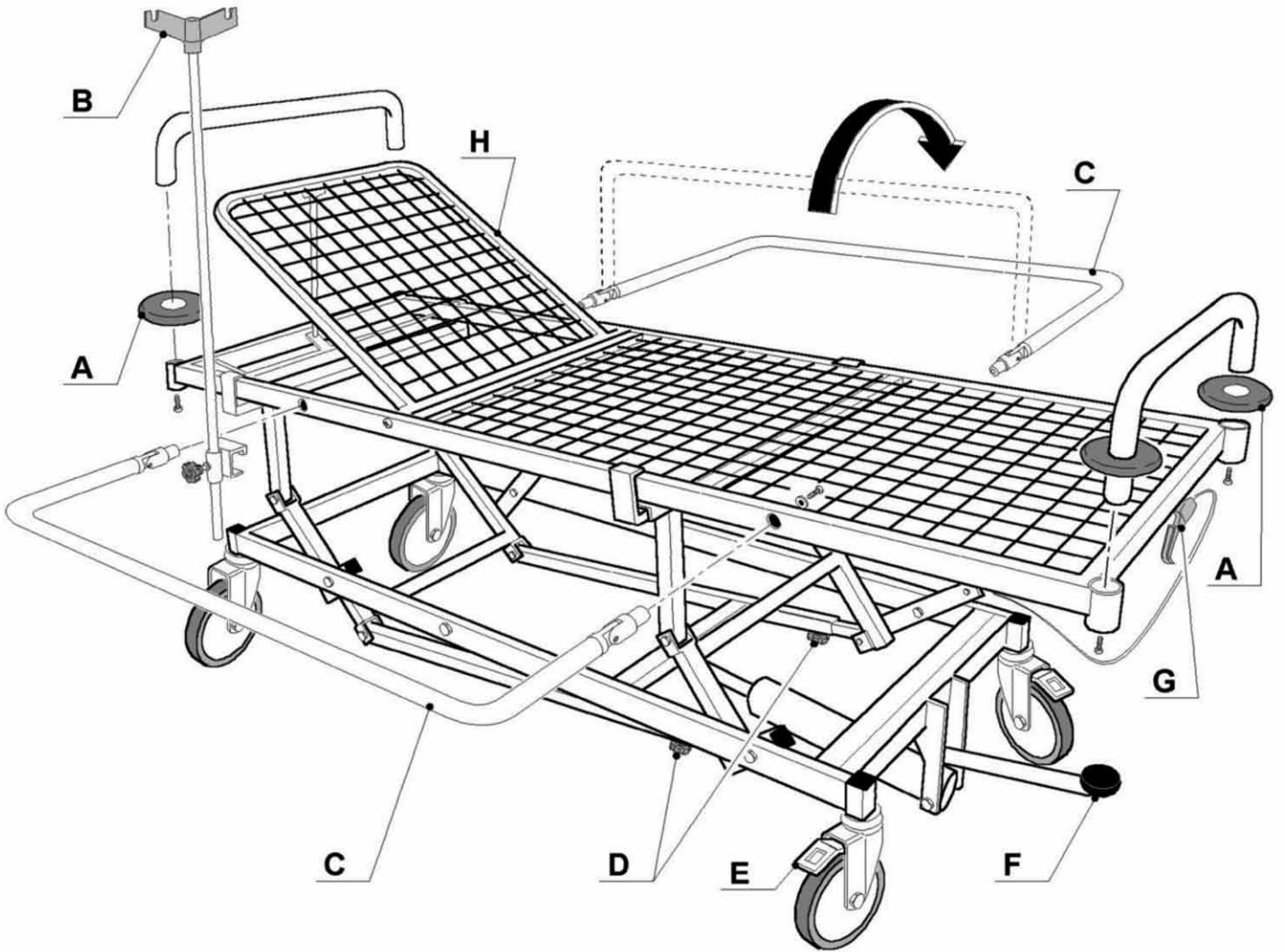

## INTRODUZIONE

Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei **DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I**. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

## DESCRIZIONE

L'uso previsto della barella è quello di agevolare il trasporto fornendo una idonea sistemazione della postura del paziente (Trendelenburg fino a 5° - anti-Trendelenburg fino a 12°), viene inoltre garantita la sicurezza del paziente tramite paracolpi e sponde ribaltabili. La barella è progettata per l'utilizzo in ambienti chiusi come ausilio per i pazienti delle strutture di cura. Il prodotto, o parti di esso, non può essere utilizzato per un uso difforme da quello specificato nell'uso previsto dal presente manuale.

## COMPONENTI:

- Rete ortopedica con funzione Trendelenburg
- Maniglie di Testata e pediera con relativi paracolpi
- Ruote Ø 200 mm di cui 2 dotate di freno
- Sponde ribaltabili su richiesta

## Sacchetto con materiale di montaggio

- N.4 paracolpi in gomma grigia
- N.4 VITI TBE 8x25 + ranelle M8

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi, è un controllo generale dei pezzi e delle parti che compongono il prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni.

Le due ruote senza freno sono installate nella testata, mentre le frenanti **E** sono installate nella pediera. Durante il montaggio i freni **E** delle ruote devono essere bloccati. Al termine dell'installazione verificare il serraggio dei dadi bloccaggio gambe e il giusto inserimento della testata e della pediera.

Il montaggio consta semplicemente dell'installazione di testata e pediera con i relativi paracolpi **A** come rappresentato in figura. L'asta portaflebo **B** e le sponde ribaltabili **C** vengono fornite a richiesta.

## FUNZIONAMENTO

Per sollevare la barella agire sul pedale **F** senza spingerlo a fine corsa. Per abbassare la barella agire sul pedale **F** premendolo a fondo fino a fine corsa. Con la barella sollevata è possibile alzare la testiera **H** agendo sulle leve attigue. La barella è provvista della funzione Trendelenburg fino a 9° e anti-Trendelenburg fino a 14°, per ottenere tali inclinazioni agire sulla leva **G** e premere o sollevare la rete fino a ottenere la posizione desiderata, quindi rilasciare la leva **G**. Le sponde ribaltabili **C** sono snodate per cui una volta alzate si bloccheranno per gravità in questa posizione; per abbassarle è necessario tirarle verso l'alto quindi ribaltarle senza lasciarle cadere. Normalmente i volantini **D** devono essere lasciati svitati o aperti; possono servire per bloccare in modo permanente la posizione del trendelenburg o in caso di emergenza qualora non funzionasse il sistema di inclinazione tramite la leva **G**.

## SCHEDA TECNICA









<b>Misure</b>	Cm 185x65 (misure interne) Cm 197x71 (misure esterne) Altezza regolabile da 51 a 71 cm Trendelenburg fino a 5° anti-Trendelenburg fino a 12°
<b>Peso</b>	64 kg – 72 kg con scatola
<b>Portata massima</b>	120 kg

## AVVERTENZE D'USO

- **Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.**
- **Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.**
- **Evitare il contatto diretto con ferite aperte.**
- **Non adatto all'uso in ambienti aperti.**
- **Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!**
- *Spostare il letto senza sollevarlo da terra.*
- *Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.*

## MANUTENZIONE E PULIZIA

- *Utilizzare solo ricambi originali.*
- *Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio*
- *Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.*
- *Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.*
- *Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.*
- *Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaci, sostanze grasse ed oleose.*
- *Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.*

	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Numero di lotto
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Fabbricante
	Dispositivo medico		

## CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.