



ATTENZIONE!

La garanzia non è valida in caso di rotture dovute ad utilizzo improprio o non conforme al protocollo d'uso o rotture a seguito di caduta.

Severo deve essere utilizzato dagli operatori **seguendo scrupolosamente il protocollo d'uso** e il manuale d'uso inseriti nella confezione. In particolare:

- La coppetta non deve essere riempita oltre la prima linea, diversamente la macchina si limiterebbe a schiacciare le compresse senza polverizzarle.
- Non devono essere polverizzate più di 2 compresse voluminose per ciclo. Questo per evitare problemi alla macchina (corpo esterno, motore) e per ottenere una buona qualità della polverizzazione.
- Severo deve essere pulito periodicamente secondo quanto previsto dal protocollo e dal manuale: “Le contaminazioni visibili su Severo possono essere rimosse in sicurezza con un panno umido e se necessario un detergente. Il plateau può essere rimosso facilmente da Severo e dovrebbe essere pulito regolarmente con una spazzola per lavastoviglie, acqua e detersivo. Il pestello in metallo e il plateau possono essere lavati anche in lavastoviglie.”
- Qualora Severo venga utilizzato su carrello è opportuno utilizzare lo “Stability Plate” che ne aumenta la stabilità e previene le cadute accidentali.

ATTENZIONE!

Severo si spegne automaticamente se non utilizzato per 10 minuti.

La SeveroCup si rompe durante la macinazione: questo indica che il plateau deve essere pulito.

Se il coperchio non è chiuso correttamente quando si desidera macinare o se il coperchio viene aperto durante la macinazione: il LED del pulsante di accensione diventerà ROSSO, rimuovere la tazza con il farmaco e chiudere il coperchio in modo che il plateau possa tornare nella sua posizione iniziale.

Severo si spegne quando è scollegato dall'adattatore AC/DC: questo indica che la batteria è assente o difettosa.

Severo non comincia a macinare quando il coperchio viene chiuso: ciò potrebbe indicare che è presente dello sporco tra il sensore e il coperchio, pulire l'area sotto il coperchio e il coperchio stesso.

Severo smette di macinare dopo pochi secondi e torna indietro: Il sensore di sovraccarico è stato attivato, troppi farmaci da macinare in un unico ciclo.

Severo dopo essere stato ACCESO (con il coperchio chiuso) ruota per 4 secondi e poi si interrompe con il pulsante di accensione che diventa ROSSO: questo potrebbe indicare che il motore è stato danneggiato da un sovraccarico (troppe compresse in unico ciclo o compresse troppo voluminose e molto resistenti, es. Tachipirina 1000).