

# Guida passo dopo passo alla macinazione di medicinali con il Macinatore professionale Severo

Seguite la procedura di macinazione raccomandata, descritta di seguito, per evitare l'esposizione accidentale alle polveri di medicinali.

Per evitare rischi di esposizione e contaminazione crociata, seguite la procedura di seguito illustrata. Altrimenti, prendete visione del tutorial online su [www.severo.nl/demovideo](http://www.severo.nl/demovideo).



**1** Aprite Severo premendo la parte inferiore della levetta grigia. Inserite il medicinale nella coppetta, riempietela in modo da non superare il primo livello, posizionate in cima e centralmente la speciale rondella.



**2** Posizionate la testata di macinazione metallica sopra la rondella, premetela all'interno della coppetta e inserite il tutto in Severo.



**3** Chiudete il coperchio. Quando il dispositivo passerà alla modalità standby, inizierà immediatamente a macinare. Altrimenti, premete il pulsante on/off per avviare il processo. Quando il ciclo di macinazione sarà completo, il pulsante si illuminerà di verde.



**4** Dopo la macinazione, aprite il coperchio ed estraete la coppetta. Controllate visivamente che nella coppetta non ci sia contaminazione. Rimuovete la testata mantenendo la rondella Severo nella coppetta.



**5** Controllate visivamente che nella testata non ci siano contaminazioni. Togliete delicatamente la rondella, verificatene l'integrità e rimuovete eventuali residui di medicinali prima dello smaltimento.



**6** Il medicinale macinato nella coppetta può essere miscelato a un liquido o aggiunto a un altro medicinale in gel prima della somministrazione. La testata di macinazione è pronta per un nuovo utilizzo.

## Requisiti

• **SeveroCup** (codice articolo MED001)

I seguenti articoli aggiuntivi sono raccomandati con Severo:

- **SeveroRondel** (codice articolo: MED003) Mantiene la testata di macinazione pulita. La rondella previene la contaminazione crociata e fa risparmiare tempo dopo ogni ciclo di macinazione.
- **SeveroCup Lid** (codice articolo MED002) Sigilla la coppetta, minimizzando il rischio di fuoriuscita e contaminazione durante il deposito e la distribuzione del medicinale.

## Pulizia

Utilizzate un panno imbevuto di alcool per rimuovere le contaminazioni visibili sulla testata di macinazione. Quelle sul dispositivo Severo, invece, possono essere rimosse al meglio con un panno umido e un detersivo.

## Suggerimenti

**Controllate sempre l'integrità di SeveroCup e SeveroRondel dopo la macinazione. I prodotti monouso sono stati ampiamente testati con i medicinali più duri, tuttavia, in condizioni estreme, non possono essere completamente esclusi danni.**

**Per massimizzare la durata della batteria, utilizzate Severo quando è scollegato dal caribatterie.**