

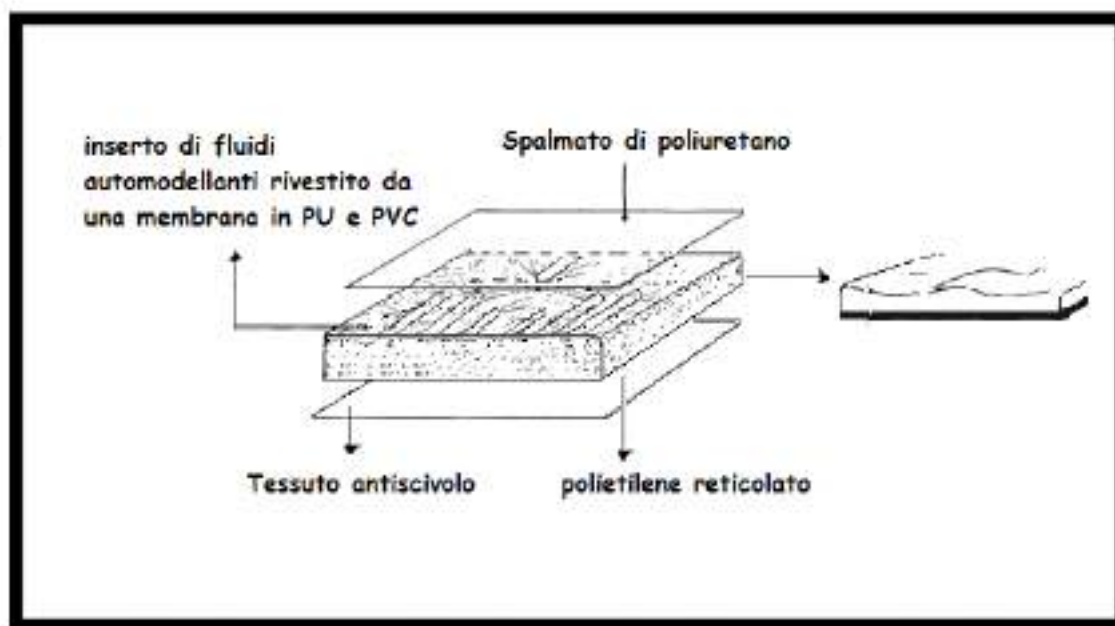
KC45**Cuscino composito con base
preformata e fluidi automodellanti**

Codice CND: Y033303

N. Reg. Repertorio Naz. dispositivi medici: VEDI RETRO

Destinazione d'uso:

Prevenzione delle piaghe da decubito

Classificazione CE: I**Caratteristiche Tecniche:**

Il cuscino composito KC45 ha la base anatomica preformata rigida con fluidi automodellanti e fodero di rivestimento amovibile mediante zip posta su tre lati.

L'interno è formato da più elementi:

- base anatomica preformata composta da una scocca rigida in polietilene reticolato nero e uno strato intermedio sagomato in poliuretano espanso in densità 25 kg/m³; l'altezza della base è stata studiata per una migliore distribuzione delle pressioni nella zona ischiatica; nello specifico, l'altezza è di 8 cm nella parte anteriore del dispositivo, mentre la parte posteriore ha un'altezza di 6,5 cm;
- un inserto di fluidi automodellanti, applicato allo strato intermedio, contenuto e bloccato da due membrane composte da PU e PVC, di 500 micron, sigillate con lavorazione in HF (alta frequenza).

Il fodero di rivestimento è realizzato in spalmato di poliuretano, tessuto traspirante e bielastico, impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, in classe 1 di reazione al fuoco per la parte superiore a contatto con l'utente e tessuto antiscivolo per la parte inferiore a contatto con il supporto (carrozzina); è dotato di due laccetti posti sui lati posteriori del fodero ed una maniglia di trasporto posta sul lato anteriore del rivestimento.

Portata max 150 kg.

Modalità d'impiego:

Posizionare il dispositivo con la cerniera rivolta verso lo schienale della seduta e la parte antiscivolo (gommata) rivolta verso il basso. L'etichetta sul fodero segnala la parte posteriore del cuscino, mentre all'interno è presente l'indicazione della parte anteriore. Il cuscino va posizionato con la parte più morbida a contatto con l'utente e la base rigida rivolta

KC45

**Cuscino composito con base
 preformata e fluidi automodellanti**



verso la seduta (carrozzina).

Manutenzione e pulizia:

Si consiglia il lavaggio del fodero a mano con saponi neutri temperatura massima 60° C, o in lavatrice programma delicati.

La sacca interna può essere pulita con alcool.



Avvertenze e precauzioni:

- Si consiglia l'uso ad un solo utente.
- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il cuscino KC45 deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

Modalità di smaltimento:

Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

Codice e misure

	larghezza	profondità	altezza ant.	altezza post.	peso	N° repertorio
KC453838	38 cm	38 cm	8 cm	6,5 cm	1,9 kg	1773644/R
KC454040	40 cm	40 cm	8 cm	6,5 cm	2,1 kg	2058665/R
KC454045	40 cm	45 cm	8 cm	6,5 cm	2,1 kg	2058666/R
KC454242	42 cm	42 cm	8 cm	6,5 cm	2,4 kg	2058668/R
KC454442	44 cm	42 cm	8 cm	6,5 cm	2,5 kg	2058670/R
KC454540	45 cm	40 cm	8 cm	6,5 cm	2,1 kg	2058671/R
KC454545	45 cm	45 cm	8 cm	6,5 cm	2,8 kg	2058672/R
KC454550	45 cm	50 cm	8 cm	6,5 cm	3,1 kg	2058673/R
KC455045	50 cm	45 cm	8 cm	6,5 cm	3,1 kg	2058678/R
KC454240	42 cm	40 cm	8 cm	6,5 cm	2,4 kg	2058667/R
KC454245	42 cm	45 cm	8 cm	6,5 cm	2,5kg	2058669/R
KC454840	48 cm	40 cm	8 cm	6,5 cm	2,6 kg	2058674/R
KC454845	48 cm	45 cm	8 cm	6,5 cm	2,8 kg	2058675/R
KC455040	50 cm	40 cm	8 cm	6,5 cm	3,1 kg	2058676/R

KC45

**Cuscino composito con base
preformata e fluidi automodellanti**



KC453440	34 cm	40 cm	8 cm	6,5 cm	1,8 kg	1773644/R
KC453740	37 cm	40 cm	8 cm	6,5 cm	1,8 kg	1773644/R
KC455350	53 cm	50 cm	8 cm	6,5 cm	3,1 kg	2058676/R
KC455650	56 cm	50 cm	8 cm	6,5 cm	3,3 kg	2058676/R
KC455850	58 cm	50 cm	8 cm	6,5 cm	3,4 kg	2058676/R



Interno



Esterno