

GUIDA D'USO

IMBRAGATURA PER WC CON PASSANTI

Importante!

- Prima di utilizzare il sistema di sollevamento Handi-Move occorre leggere e capire le istruzioni contenute nel presente manuale
- Quando si utilizza l'imbragatura la prima volta, assicurarsi che sia quella adatta per l'utilizzatore
- Quest'imbragatura è meno indicata per persone con basso tono muscolare, scarso controllo della testa e persone ipotoniche
- Prima di iniziare il sollevamento, assicurarsi che la persona sia posizionata in modo sicuro e che i passanti siano fissati correttamente
- La cinghia in Velcro è prima di tutto un dispositivo di sicurezza e non deve quindi essere utilizzata come supporto
- Non sollevare mai la persona più di quanto sia necessario
- Non lasciare mai la persona sola nell'imbragatura
- Per la manutenzione dell'imbragatura seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta
- Mantenere chiusa la cinghia in Velcro durante il lavaggio e quando non è utilizzata. Questo evita che si sfilaccino i bordi. Non lavare mai l'imbragatura con indumenti in lana o materiale con peluria
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il tessuto, le cuciture, i punti di giunzione, i passanti e i relativi attacchi non presentino segni di usura o danneggiamento. In questi casi sostituire immediatamente l'imbragatura ed eliminare quella vecchia
- L'imbragatura deve essere utilizzata solo con la gamma di sollevatori Handi-Move

Il mancato rispetto delle istruzioni succitate può provocare incidenti a voi stessi e agli altri.

Utilizzo dalla posizione seduta

1 Con la mano distesa far scivolare l'imbragatura tra la sedia a rotelle e la schiena della persona con la cinghia in Velcro posizionata all'altezza dell'inguine. Importante: è più facile inserire l'imbragatura se la persona si china in avanti o se viene aiutata a spingersi leggermente in avanti.



2 Aggiustare la parte rinforzata intorno al tronco della persona e tirare su fino alle ascelle. Lasciare libere le braccia della persona.




3 Chiudere la cinghia in velcro.



4 Tirare fuori i lembi per le gambe dell'imbragatura accanto alla coscia della persona e tirarli sotto ciascuna coscia. Assicurarsi che il tessuto sia ben disteso e che i lembi per le gambe avvolgano le cosce. Incrociare i lembi e poi attaccarli al bilancino.



5 Se volete tenere unite le gambe potete incrociare i passanti dei lembi per le cosce.

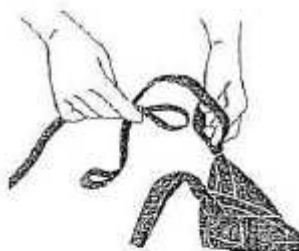

6 Sistemare il bilancino sopra la testa della persona, tenerlo con una mano, e con la mano libera applicate i passanti.



7 A questo punto la persona può essere trasferita (ad es. sul WC).

