

Descrizione ed indicazioni

Comoda realizzata in due colori pastello, blu e verde, regolabile in altezza o con ruote. Costituita da un'intelaiatura d'acciaio in tinta grigia e da seduta e schienale morbidi, assolve alla triplice funzione di comoda wc, rialzo per wc e, con l'aggiunta di un cuscino, sedia normale.

Istruzioni per il montaggio

Comode regolabili in altezza

Regolare l'altezza delle gambe utilizzando le clip.

E' possibile una differenza massima di un foro tra le gambe anteriori e quelle posteriori. Le gambe di destra e di sinistra devono, invece, essere sempre regolate alla stessa altezza.

Comode con ruote

Fissare la coppia di ruotini alle gambe della comoda tramite le apposite viti avendo cura di posizionare quelle con il sistema frenante nella parte posteriore del dispositivo.

Prima del trasporto assicurarsi che i freni siano azionati e che le ruote siano orientate in avanti.

Non spingere la comoda in discesa o su superfici danneggiate.

Non tentare di superare ostacoli superiori a 5 mm di altezza.

Avvertenze

Non superare la portata massima indicata.

Prestare particolare attenzione in caso di utilizzo su superfici umide o bagnate.

Assicurarsi, prima dell'uso, che il dispositivo si trovi su superficie piana e non scivolosa.

Le comode sono progettate per utilizzo interno e non devono essere usate come sedie per doccia.

Materiali componenti

Struttura: acciaio

Seduta e schienale: legno con imbottitura rivestita in PVC

Caratteristiche tecniche comode regolabili in altezza (RA-211600 - RA-211601)

Altezza da terra alla seduta: 40 - 50 cm

Larghezza seduta: 47 cm

Profondità seduta: 44 cm

Altezza braccioli: 16,5 cm

Ingombro comoda: 59 x 52 x 83 cm

Portata massima: **110 kg**

Caratteristiche tecniche comode con ruote (RA-211603 - RA-211604)

Altezza da terra alla seduta: 43 cm

Larghezza seduta: 45 cm

Profondità seduta: 45 cm

Altezza braccioli: 10 cm

Circonferenza ruote: 10 cm

Ingombro comoda: 59 x 52 x 87 cm

Portata massima: **110 kg**

Pulizia

Pulire con un panno morbido e con detergenti neutri.

Non usare spugne abrasive.

Non utilizzare prodotti a base d'ammoniaca o candeggina sulle finiture in PVC.

Dispositivo autoclavabile - 1 ora alla temperatura di 80°.

Garanzia

12 mesi per difetto di produzione.



COMODE STILE FRANCESE

RA-211600
RA-211601

Blu regolabile in altezza
Verde regolabile in altezza

RA-211603
RA-211604

Blu con ruote
Verde con ruote



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE