

# BIDET PER ALZA WC CON FISSAGGI LATERALI

Codice Interno: **RA-210150**

## Descrizione ed indicazioni

Bidet in plastica da inserto con portasapone. Indicato per facilitare l'igiene intima quotidiana. Applicabile a tutti gli alzawater Intermed con fissaggi laterali codice RA-2101xx ed RA-2101xxC.

## Come usare il dispositivo

Riempire il bidet con acqua e inserirlo nel foro dell'alzawater già applicato alla toilette. Dopo l'uso il bidet può essere svuotato direttamente nel wc senza necessità di rimuovere l'alzawater.

## Avvertenze

Prima di ogni impiego controllare che l'alza wc sia perfettamente fissato sul wc e che il bidet sia perfettamente inserito nel foro. Monitorare costantemente durante l'impiego le persone con ridotte capacità fisiche o mentali.

## Istruzioni per la pulizia

Il bidet può essere lavato con acqua tiepida e sapone neutro anche in totale immersione.

## Garanzia

12 mesi per difetto di fabbricazione.



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



# BIDET PER ALZA WC CON FISSAGGI LATERALI

Codice Interno: **RA-210150**

## Descrizione ed indicazioni

Bidet in plastica da inserto con portasapone. Indicato per facilitare l'igiene intima quotidiana. Applicabile a tutti gli alzawater Intermed con fissaggi laterali codice RA2101xx ed RA-2101xxC.

## Come usare il dispositivo

Riempire il bidet con acqua e inserirlo nel foro dell'alzawater già applicato alla toilette. Dopo l'uso il bidet può essere svuotato direttamente nel wc senza necessità di rimuovere l'alzawater.

## Avvertenze

Prima di ogni impiego controllare che l'alza wc sia perfettamente fissato sul wc e che il bidet sia perfettamente inserito nel foro. Monitorare costantemente durante l'impiego le persone con ridotte capacità fisiche o mentali.

## Istruzioni per la pulizia

Il bidet può essere lavato con acqua tiepida e sapone neutro anche in totale immersione.

## Garanzia

12 mesi per difetto di fabbricazione.



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

