

Rev. 01  
Luglio 2010



## Scheda tecnica

CN-100.5XX

Pessari in silicone



Codice	Descrizione
CN-100.538	Pessari in silicone diametro 50 mm.
CN-100.539	Pessari in silicone diametro 55 mm.
CN-100.540	Pessari in silicone diametro 60 mm.
CN-100.541	Pessari in silicone diametro 65 mm.
CN-100.542	Pessari in silicone diametro 70 mm.
CN-100.543	Pessari in silicone diametro 75 mm.
CN-100.544	Pessari in silicone diametro 80 mm.
CN-100.545	Pessari in silicone diametro 85 mm.
CN-100.546	Pessari in silicone diametro 90 mm.
CN-100.547	Pessari in silicone diametro 95 mm.
CN-100.548	Pessari in silicone diametro 100 mm.

Indicazioni	
Produttore	<b>FOR.ME.SA Srl</b>
CND	U089005
Repertorio	19867/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Pessari in silicone di varie misure.

### Descrizione

Il presente dispositivo è indicato per la contenzione del prolasso uterino. Il tempo di utilizzo continuativo sul paziente deve essere definito dal personale medico competente.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità al materiale componente.

Non è consentito:

1. l'uso del dispositivo a contatto con parti lese (ferite);
2. il riutilizzo del dispositivo dopo l'uso;
3. l'utilizzo per un tempo superiore a quello definito dal personale medico;
4. l'utilizzo in abbinamento o come parte di altri dispositivi medici;
5. la modifica o l'alterazione delle parti costituenti e/o delle caratteristiche;
6. l'uso di medicinali o di sostanze considerate tali o ad esse equiparabili in abbinamento o congiuntamente al dispositivo;
7. l'abuso nell'utilizzo.

Dispositivo non sterile monouso.

Non contiene lattice.

## Conservazione

Il dispositivo viene fornito con l'imballo standard della società produttrice che ne garantisce il corretto stoccaggio prima dell'uso. Per mantenere la corretta conservazione nel tempo, si consiglia di utilizzare sempre l'imballo originale in ambiente asciutto avente temperature comprese tra +1°C e +40°C, non a diretto contatto con fonti irradianti di calore, al riparo da polveri e materiali nocivi ed al di fuori della portata dei bambini.

Non accatastare parti pesanti sopra il dispositivo.

Non sottoporre il medesimo a stress meccanici.

## Pulizia

Prima di utilizzare il dispositivo, eseguire un lavaggio utilizzando acqua tiepida e sapone neutro e poi risciacquare con soluzione fisiologica.

Non utilizzare spazzole, ma solo spugne morbide in modo da non graffiare la superficie in gomma del dispositivo.

Non utilizzare alcool, solventi, acidi e comunque liquidi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Dopo la pulizia, non lasciare incustodito il dispositivo, ma posizionarlo immediatamente in sede vaginale.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142