

## **AVVERTENZE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

## **DESCRIZIONE**

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio e ruote con freni di stazionamento. Due livelli di regolazione in altezza. Schienale e seduta in poliuretano morbido. Braccioli ribaltabili con poggia-braccio. Pedane estraibili.

## **MATERIALI COMPONENTI**

Struttura e braccioli	Alluminio
Seduta e schienale	Poliuretano
Poggia-braccia	Materiale plastico
Ruote	Plastica con coperture in gomma
Pedane poggia-piedi	Alluminio

## **DATI TECNICI**

Dimensioni schienale 36 x 26 cm  
Dimensioni seduta 42 x 42 cm  
Dimensioni foro 16 x 32 cm  
Distanza tra braccioli 46 cm  
Lunghezza braccioli 32 cm  
Diametro ruote 10 cm  
Spessore ruote 3 cm  
Altezze seduta 53 e 56 cm  
Peso 11 kg

**Portata 120 kg**

## **CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## **PRECAUZIONI**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto fissaggio di seduta, braccioli e pedane. Controllare lo stato delle coperture in gomma delle ruote ed il funzionamento dei freni di stazionamento.  
Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità di deambulazione.

## **MODALITA' DI MONTAGGIO**

Applicare la seduta alla struttura tramite appositi supporti in plastica fissando all'altezza desiderata con le viti con manopola in dotazione. Sistemare i braccioli assicurandoli con le clip di bloccaggio. Montare le pedane ed inserire la vaschetta.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.  
Verificare periodicamente il funzionamento dei freni di stazionamento e lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

## **SMALTIMENTO**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.  
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## **GARANZIA**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.  
La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti consumabili.



## ISTRUZIONI PER L'USO

### **SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO CON RUOTE LINEA MODERN**

**SCHIENALE FISSO  
BRACCIOLI RIBALTABILI  
PEDANE ESTRAIBILI  
AB-92**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
[www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it) • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)