

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>BIDET DA INSERTO</p> <p>PER ALZAWATER</p> <p>CON FISSAGGI LATERALI</p>	<p>Rev 00</p> <p>Maggio 2008</p>
--	---	----------------------------------

Codice	RA-210150
--------	------------------

Descrizione ed indicazioni

Bidet in plastica da inserto con portasapone. Indicato per facilitare l'igiene intima quotidiana. Applicabile a tutti gli alzawater Intermed con fissaggi laterali codice RA-2101xx ed RA-2101xxC.

Modalità d'impiego

Riempire il bidet con acqua e inserirlo nel foro dell'alzawater già applicato alla toilette. Dopo l'uso il bidet può essere svuotato direttamente nel wc senza necessità di rimuovere l'alzawater.

Avvertenze

Prima di ogni impiego controllare che l'alza wc sia perfettamente fissato sul wc e che il bidet sia perfettamente inserito nel foro. Monitorare costantemente gli utilizzatori con ridotte capacità di deambulazione.

Pulizia

Il bidet può essere lavato con acqua tiepida e sapone neutro anche in totale immersione.

Codice CND: Y091299

Progressivo di registrazione: 97770

Garanzia 12 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE