

**CAVIGLIERA BIVALVA
CON INSERTI IN SILICONE**

Misura	Codice
Unica	CV-002

**Indicazioni**

- Traumi distorsivi.
- Recupero funzionale in fase post-operatoria o post-traumatica.
- Instabilità legamentosa cronica.

Descrizione

- Struttura bivalva anatomica con fascia di regolazione per tallone a velcro.
- Doppia cinghia di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro.
- Inserti laterali asportabili in silicone.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della cavigliera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della cavigliera e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della cavigliera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della cavigliera su altri pazienti.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016
Fax. +39-02-98247361

SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2013

CAVIGLIERA BIVALVA CON INSERTI IN SILICONE

Materiali componenti

Struttura	Polipropilene e poliossimetilene
Inserti	Silicone
Cinghie di stabilizzazione	Poliestere
Chiusure	Nylon
Fascia regolazione tallone	Poliestere

Dati tecnici

Altezza valva	255 mm
Larghezza valva	85 mm
Altezza imbottitura	270 mm
Larghezza imbottitura	100 mm
Lunghezza cinghie	460 mm
Lunghezza fascia reg. tallone	230 mm

Modalità di lavaggio

Pulire con spugna morbida e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore **INTERMED srl**

Codice CND **Y061206**
N. Repertorio **988074/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE