

SALVALAVITA[®] HOME

COD. 3112H

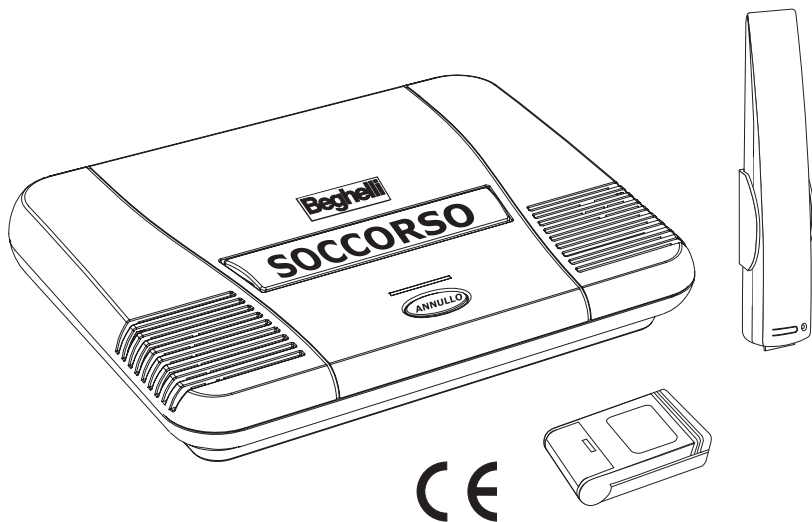

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

Beghelli

• Cos'è Salvalavita HOME Beghelli	pag. 3
• Installazione	pag. 4
Come verificare il collegamento alla linea telefonica	pag. 5
• Programmazione	pag. 6
Come Inserire i numeri di telefono	pag. 6
Come ascoltare i dati inseriti	pag. 8
Verifica del telecomando	pag. 8
• Utilizzo del dispositivo	pag. 9
Per inviare una richiesta di soccorso	pag. 9
Per interrompere la chiamata di soccorso attivata accidentalmente	pag. 9
Cosa deve fare chi riceve una chiamata di allarme	pag. 9
Autodiagnosi anomalie e ascolto della memoria eventi	pag. 9
• Espansione dell'impianto e programmazione avanzata	pag. 10
Come programmare un telecomando aggiuntivo	pag. 10
Come programmare un sensore aggiuntivo	pag. 11
Come verificare la portata radio di un sensore aggiuntivo	pag. 12
Funzionamento del sistema ambientale	pag. 13
Programmazione a distanza	pag. 13
• Funzioni avanzate	pag. 14
• Scheda di impianto	pag. 17
• Caratteristiche tecniche	pag. 19
• Avvertenze - Garanzia	pag. 20

Grazie per avere acquistato Salvalavita HOME Beghelli. Per l'installazione e l'utilizzo seguite le istruzioni contenute nel presente manuale.

N.B.: il telecomando, incluso nella confezione, è già accoppiato a Salvalavita HOME; il sensore di allagamento, invece, deve essere accoppiato a Salvalavita HOME seguendo le istruzioni del paragrafo "Come programmare un sensore aggiuntivo".

COS'È SALVALAVITA HOME BEGHELLI

Salvalavita HOME Beghelli è un dispositivo in grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza semplicemente premendo il pulsante SOCCORSO sul dispositivo o il tasto ROSSO del telecomando in dotazione.

Il sistema funziona in due modi alternativi:

- il dispositivo chiama fino a 8 numeri di telefono, precedentemente programmati, riproducendo un messaggio vocale che comunica la causa dell'allarme e il numero di telefono dal quale proviene.
- in alternativa il dispositivo può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo 24 ore su 24. Il Centro SOS Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente (per l'attivazione chiamate il Numero Verde 800 626626 o visitate il sito www.beghelli.it/salvalavita). Servizio gratuito per il primo anno.

Attenzione:

In presenza di linea telefonica digitale (fibra/adsl/gsm) Salvalavita HOME non può essere collegato al Centro SOS Beghelli.

La compatibilità del collegamento con il Centro SOS è garantita solo in caso di linea telefonica tradizionale.

È possibile collegare al dispositivo fino a 8 dispositivi radio:


- Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio (codice 8308);
- Sensore di allagamento (codice 9104); un pezzo già incluso nel Salvalavita HOME Beghelli;
- Telecomando (codice 8075); un pezzo già incluso nel Salvalavita HOME Beghelli.

Il dispositivo deve essere collegato alla rete 230V ed alla linea telefonica. Tramite la batteria ricaricabile di cui è dotato, è in grado di funzionare anche in assenza della corrente elettrica.


INSTALLAZIONE

Collegate il dispositivo alla presa di alimentazione 230V ed alla presa telefonica, posizionandolo ad almeno 50cm da dispositivi elettronici (es: cordless o cellulari), che potrebbero essere causa di malfunzionamenti.


In caso di linea telefonica digitale, o di linea derivata da centralino, è necessario collegarsi ad una uscita analogica.

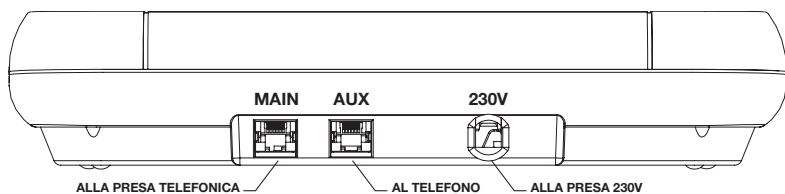


A

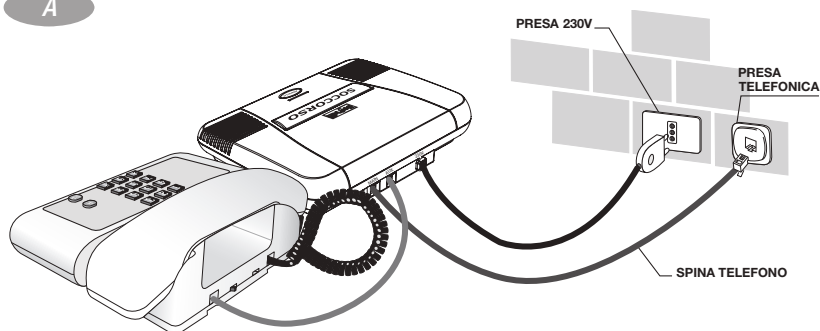

B

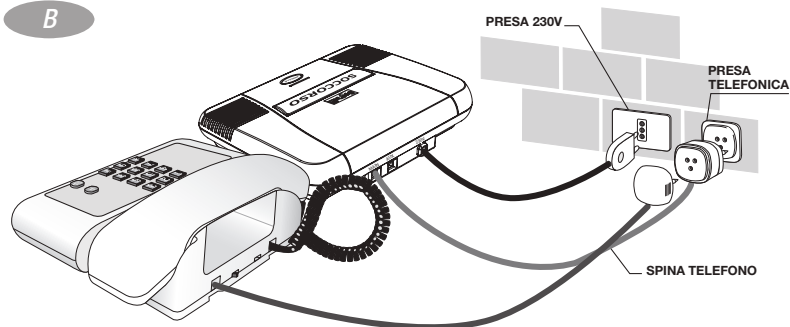

Al termine dell'installazione sollevate il ricevitore telefonico e accertatevi che sia emesso il segnale di linea libera; in caso contrario verificate di avere eseguito correttamente i collegamenti. Il LED VERDE lampeggia per indicare che occorre programmare i numeri di telefono.

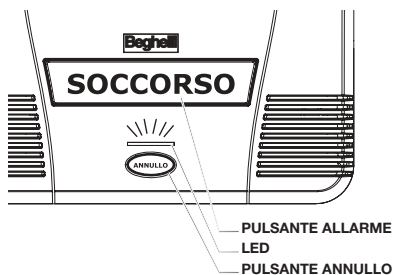

Attenzione:




Se il dispositivo è collegato ad una linea telefonica che, per funzionare, necessita della rete elettrica (es. cordless), in caso di black-out non sarà possibile l'invio di chiamate di soccorso.

Come verificare il collegamento alla linea telefonica

Tenendo premuto il pulsante ANNULLO, premete anche il pulsante SOCCORSO: il dispositivo accende l'altoparlante e si deve sentire il segnale di linea telefonica libera.

Premete il pulsante ANNULLO per uscire.

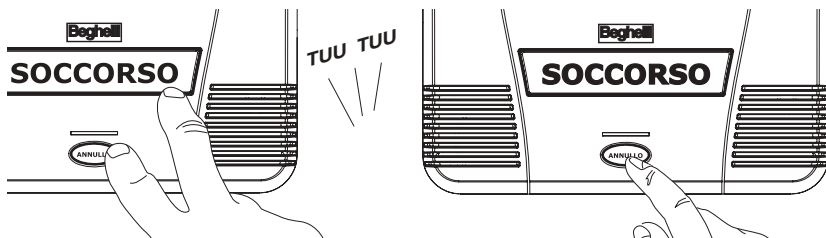

COME INSERIRE I NUMERI DI TELEFONO

Se desiderate utilizzare il dispositivo con collegamento al Centro SOS Beggelli, contattate il Centro Servizi al Numero Verde 800 626626 o visitate il sito www.beggelli.it/salvalavita


Nel caso di utilizzo del dispositivo senza l'intervento del Centro SOS Beggelli la programmazione avviene seguendo i passi successivi e utilizzando l'apparecchio telefonico collegato:

1. inserite il "numero di telefono dell'utente" (numero di telefono da cui il dispositivo chiamerà e che sarà ripetuto nel messaggio di allarme per dare modo a chi riceve la chiamata di identificare la provenienza dell'allarme stesso);
2. inserite fino a 8 numeri di telefono che verranno chiamati in caso di allarme. I numeri di telefono verranno chiamati seguendo l'ordine di programmazione dal numero 1 al numero 8.


NOTA: il settimo e l'ottavo numero di telefono sono preimpostati in modo da essere chiamati, sia in caso di allarme, sia in caso di batteria bassa o di malfunzionamento dei Sensori aggiuntivi collegati.

In caso di dubbi su come procedere con queste impostazioni, contattate il Numero Verde 800 626626.

Per programmare i numeri telefonici procedete come segue:

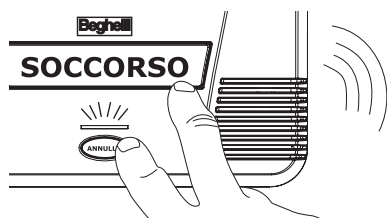

- 1 Tenendo premuto il pulsante ANNULLO, premete anche il pulsante SOCCORSO: il LED lampeggia VERDE/ROSSO e si sente il segnale di linea telefonica libera.

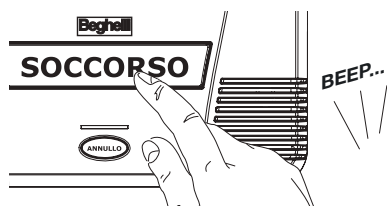

- 2 Rilasciate il pulsante ANNULLO e ripremete il pulsante SOCCORSO sul dispositivo per entrare nella fase di inserimento dei numeri telefonici: la guida vocale riproduce "Beep programmazione" e invita a inserire il numero dell'utente ("Inserire numero di linea telefonica").

- 3 Sollevate il ricevitore telefonico e componete sulla tastiera il **vostro numero telefonico** (al massimo 18 cifre) attendendo, dopo ciascuna cifra, la ripetizione vocale del numero digitato.
- 4 Dopo aver inserito tutte le cifre, riagganciate il ricevitore telefonico o premete il tasto #: la guida vocale riproduce "Memorizzato".

In caso di allarme, il dispositivo ripeterà automaticamente questo numero, insieme al messaggio di allarme registrato dalla Beggelli (ad esempio: "Attenzione, richiesta di soccorso sanitario presso numero di telefono...").

Ora inserite i numeri telefonici ai quali inviare, in caso di necessità, la richiesta di soccorso, seguendo le istruzioni dal punto 5 al punto 7.

- 5** La guida vocale riproduce *“Inserire numero di telefono allarme 1”*.
- 6** Componete sulla tastiera del telefono il numero telefonico che il dispositivo deve chiamare per primo in caso di allarme (al massimo 18 cifre) attendendo, dopo ciascuna cifra, la ripetizione vocale del numero digitato.
- 7** Dopo aver inserito tutte le cifre, riagganciate il ricevitore telefonico per confermare o premete il tasto #: la guida vocale riproduce *“Memorizzato”*.
- 8** La guida vocale riproduce *“Inserire numero di telefono allarme 2”*.

Se volete inserire il secondo numero di telefono che Salvalavita HOME chiamerà in caso di allarme procedete come indicato dal punto 5 al punto 7.

Se non volete inserire il numero di telefono, riagganciate il ricevitore telefonico senza premere alcun tasto: la guida vocale riproduce *“Concellato”*. L'eventuale numero telefonico precedentemente inserito viene cancellato.

Dopo l'ottavo numero di telefono il dispositivo elencherà automaticamente i dati presenti in memoria: numero di linea telefonica, i numeri di telefono da 1 a 8 (*“Numero di linea telefonica.., Numero di telefono allarme 1.., .., Numero di telefono allarme 8..”*).

- 9** Annotate i numeri telefonici nella *“Scheda di impianto”* in fondo al manuale.
- 1** Per riportare il dispositivo al funzionamento normale premete il pulsante ANNULLO.

NOTE:


Per inserire una pausa (attesa di 2 secondi che il dispositivo esegue quando compone il numero telefonico in fase di allarme) premete il tasto ★ sulla tastiera del telefono; la guida vocale riproduce: *“Pausa”* (funzione utile in presenza di centralini telefonici).

Per correggere un numero telefonico ripartire dal punto 1 e inserite nuovamente tutti i dati.

Per sostituire un numero telefonico ripartire dal punto 1 e inserite nuovamente tutti i dati.

Per aggiungere un nuovo numero telefonico (nel caso non ne abbiate inseriti già 8), ripartite dal punto 1 e inserite nuovamente tutti i dati.

COME ASCOLTARE I DATI INSERITI

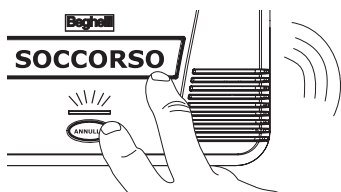

1 Tenendo premuto il pulsante ANNULO, premete anche il pulsante SOCCORSO.

2 Rilasciate il pulsante ANNULO e ripremete il pulsante SOCCORSO: la guida vocale riproduce "Beep programmazione".

3 Premete nuovamente il pulsante SOCCORSO: la guida vocale riproduce "Beep verifica programmazione" ed elenca i numeri telefonici presenti in memoria ("Numero di linea telefonica.., Numero di telefono allarme 1.., .., Numero di telefono allarme 8..").



4 Per riportare il dispositivo al normale funzionamento, premete il pulsante ANNULO.



VERIFICA DEL TELECOMANDO

ATTENZIONE: I disturbi prodotti dalle apparecchiature elettroniche (es: cordless o cellulari), poste nelle immediate vicinanze del dispositivo, potrebbero essere causa di malfunzionamenti.

Per una corretta installazione posizionate il dispositivo ad almeno 50cm da altri dispositivi elettronici.

Premete il tasto ROSSO del telecomando e verificate che il sistema vada in allarme.

Se il dispositivo emette un segnale acustico intermittente significa che il telecomando lo ha raggiunto e che si prepara ad inviare la chiamata di soccorso.

Premete subito il pulsante ANNULO per interrompere l'attivazione ed evitare di allarmare inutilmente chi risponde ai numeri telefonici programmati.

Ripetete l'operazione da altri punti della casa, dove ritenete possibile l'utilizzo del telecomando, per verificarne la portata massima.

Ripetete periodicamente la verifica per accertarvi che la batteria del telecomando sia ancora sufficientemente carica e, se necessario, sostituirla aprendo lo sportellino sul retro del telecomando stesso.



PER INVIARE UNA RICHIESTA DI SOCCORSO

Premete il pulsante SOCCORSO sul dispositivo o il tasto ROSSO sul telecomando.



Il dispositivo emette una segnalazione acustica intermitten-te, il LED ROSSO lampeggia, e inizia a chiamare uno ad uno i numeri di telefono impostati, alternando le chiamate ai numeri fino a 10 volte ognuno.

Durante le chiamate viene riprodotto, per circa un minuto, un messaggio a sintesi vocale indicante la causa e la provenienza dell'allarme (ad esempio, in caso di chiamata di soccorso da Telecomando, il messaggio sarà: *“Attenzione, richiesta di soccorso sanitario presso numero di telefono... premere 7 per parlare in vivavoce, 99 per interrompere l'allarme”*).

PER INTERRUPTERE LA CHIAMATA DI SOCCORSO ATTIVATA ACCIDENTALMENTE

- Premete immediatamente pulsante ANNULLO.
- In caso di collegamento con il Centro SOS Beghelli comunicate all'operatore che l'allarme è annullato.

COSA DEVE FARE CHI RICEVE UNA CHIAMATA DI ALLARME

- Deve ascoltare bene il messaggio vocale per capire causa e provenienza dell'allarme;
- può attivare direttamente il vivavoce premendo il tasto “7” sulla tastiera del telefono ed accertarsi delle condizioni di salute della persona che ha attivato l'allarme;
- può annullare l'allarme premendo i tasti “99” sulla tastiera del telefono in modo da non essere più richiamati (questa operazione interrompe il ciclo di chiamate; se si vuole che il dispositivo continui ad allertare gli altri numeri riagganciare la cornetta senza digitare “99”);
- può avvertire i soccorsi in caso di necessità.

In caso di collegamento al Centro SOS Beghelli verrà automaticamente riconosciuta la causa e la provenienza della chiamata e l'operatore attiverà il colloquio a vivavoce per definire l'entità dell'emergenza; se l'operatore non riceve risposta seguirà la procedura definita sul contratto.

NOTA: Le funzioni “7” e “99” sono attivabili da un qualsiasi telefono impostato nella modalità a toni (multifrequenza o DTMF).

AUTODIAGNOSI ANOMALIE E ASCOLTO DELLA MEMORIA EVENTI

Il dispositivo è in grado di rilevare eventuali anomalie, del dispositivo stesso e dei sensori aggiuntivi collegati, segnalandole mediante il LED VERDE lampeggiante. Premendo il pulsante ANNULLO la guida vocale riprodurrà il motivo dell'anomalia (es. *“Sensore 1 batteria esaurita ...”*) e, nel caso in cui si sia attivato un allarme di tipo ambientale, fornirà anche l'indicazione del sensore che ha attivato l'allarme (es: *“Sensore 2 Allarme allagamento ...”*). Una volta individuato il sensore che ha attivato l'allarme, è consigliabile cancellare la memoria eventi in modo da conservare solo informazioni recenti. Per fare ciò tenete premuto il pulsante ANNULLO per 4 secondi: la guida vocale confermerà riproducendo *“Memoria eventi cancellata”*.