

Manipolo I-TECH UT2 con Testina Multifrequenza 1 cm²

1. Descrizione Generale

Il manipolo multifrequenza I-TECH con area irradiante di 1 cm² è un accessorio professionale progettato per l'erogazione di ultrasuonoterapia mirata. La testina di dimensioni ridotte lo rende lo strumento elettivo per il trattamento di zone corporee con superfici irregolari o di piccole dimensioni (mani, piedi, viso, piccole articolazioni).

2. Compatibilità Dispositivi

Il presente accessorio è compatibile esclusivamente con i seguenti modelli della linea I-TECH Medical Division:

- I-TECH UT1
- I-TECH UT2
- I-TECH UE (Combinato Ultrasuoni + Elettroterapia)

3. Specifiche Tecniche

Parametro	Valore / Caratteristica
Frequenza di Lavoro	1 MHz e 3 MHz (Multifrequenza)
Area Irradiante Effettiva (ERA)	1 cm ²
Materiale Testina	Alluminio ad alta efficienza acustica
Tipo di Fascio	Collimato
Sensore di Contatto	Integrato (Segnalazione LED sul manipolo)
Protezione Liquidi	Idoneo per trattamento a contatto e in immersione

Connettore	Circolare schermato specifico serie UT
-------------------	--

4. Indicazioni Terapeutiche

- Trattamento di piccole articolazioni (rizartrosi, dita a scatto).
- Infiammazioni tendinee circoscritte.
- Punti trigger (Trigger Points).
- Trattamenti estetici localizzati e cicatrici.
- Terapia riabilitativa in acqua (subacquea).

5. Manutenzione e Pulizia

- **Dopo ogni uso:** Rimuovere completamente i residui di gel conduttivo con un panno morbido non abrasivo.
- **Sanificazione:** Utilizzare detergenti disinfettanti a base alcolica nebulizzati su un panno. Non spruzzare direttamente sul connettore del cavo.
- **Conservazione:** Riporre il manipolo nell'apposito alloggiamento del dispositivo per evitare cadute accidentali che potrebbero danneggiare il cristallo piezoelettrico.

6. Certificazioni

Accessorio conforme alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE (e successivi aggiornamenti).
Classe di rischio: IIa.