

Albo Land srl

Via Mastroianni,9
40013 Castel Maggiore BO (Italy)
Tel:+39 051/373838 Fax: +39 051/371877
P.IVA: 01778301208
Capitale Sociale €12000 I.V.
www.alboland.com info@alboland.com
R.E.A. 387661 Iscr.Reg.Imp.BO 163652

ALBO *Land* TM
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

REF 738	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione. VEDI LOTTO	Ultima modifica. 20/04/2020
MATERASSINO TUBOLARE per trasferimento-alto scorrimento			
			
MISURE: Cm 50X60	 		
COLORE: BLU.			
COMPOSIZIONE: ESTERNO: 100% PA – INTERNO 100% PES.	LAVAGGIO: LAVARE COME FOSSE UN CAPO DELICATO, NON CADDENGGIARE E NON STIRARE.ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.		
INDICAZIONI: OTTIMO PER IL POSIZIONAMENTO NEL LETTO DEL PAZIENTE E PER IL TRASFERIMENTO TRA LETTO, CARROZZINA, BAGNO, AUTO, ECC.. FACILITÀ IL LAVORO DEGLI OPERATORI E L'AUTONOMIA DEL PAZIENTE. E' CONSIGLIABILE L'UTILIZZO CON L'ASSE DI TRASFERIMENTO COD. 742.	ISTRUZIONI: PORRE IL PAZIENTE SOPRA ALLA PARTE DI COLERE BLU DEL TUBOLARE E ESEGUIRE LO SPOSTAMENTO.		
CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	CONFEZIONE: BUSTA DI PLASTICA.		
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO O ALTERAZIONE DEL PRODOTTO, INFORMARE TEMPESTIVAMENTE ALBO LAND SRL AI SEGUENTI RECAPITI: e-mail: info@alboland.com Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 371877	GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO A NORMA DI LEGGE. PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONALE ESPERTO.		
	SMALTIMENTO: LO SMALTIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI E LOCALI IN VIGORE.		
738 N° progressivo: 342058 GMDN: 37163 CND: V0899	 DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I		