


**Nome Prodotto**PANCERA "OMNIA" H. 28 cm  
(cod. 252)

<b>REF</b>	Taglie	Misure Circonferenza Vita (da cm a cm)
252	S	60/75
	M	75/90
	L	90/110
	XL	110/120
	XXL	120/130
	XXXL	130/140

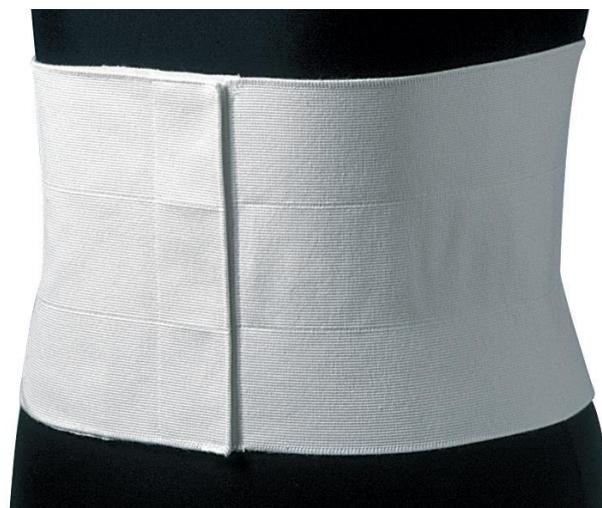

Altezza 28 cm.

**Destinazione d'Uso**

Per pazienti che hanno subito interventi chirurgici a livello addominale. Favorisce la riduzione della sintomatologia algica, la contenzione dei tessuti e la guarigione delle ferite come il post-parto favorendo il ripristino del normale tono addominale. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

53% Cotone, 19% Poliammide, 16% Poliestere, 12% Elastico contenente Lattice.  
Struttura in tre fasce; forma trapezoidale e chiusura a strappo regolabile con patta di cm 20.

**Istruzioni per l'Uso**

Indossare in vita sopra un capo di biancheria intima possibilmente di fibra naturale, e regolare la tensione tramite la chiusura adesiva in velcro, che con i suoi 20 cm. di larghezza permette una corretta aderenza.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.  
Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.  
Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in scatola di cartone.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Pancera → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030499

Codice EMDN: M030499

Codice BD/RDM: 2518772



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902